

Link do produktu: <https://redmed.pl/ab0-trol-forte-ii-wykrywanie-grupy-krwi-50-szt-p-498.html>

AB0-trol forte II - wykrywanie grupy krwi - 50 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL820001
Kod producenta	820001
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test służy do wykrywania grup krwi z jednej próbki bezpośrednio przy łóżku pacjenta, zapewniając większe bezpieczeństwo przy przetaczaniu krwi. Oznaczanie kompatybilności A/B/O.

W przypadku każdego zabiegu operacyjnego konieczne jest szybkie, proste i wiarygodne ustalenie grupy krwi pacjenta. Tuż przed transfuzją personel medyczny powinien przeprowadzić badanie (przy łóżku oznaczenia) AB0 u odbiorcy. Służy ono potwierdzeniu uprzednio ustalonym właściwościom grup krwi AB0 odbiorcy. Test zgodności AB0 może być wykonywany dodatkowo z transfuzyjnego koncentratu erytrocytów.

Podział na grupy krwi związany jest z występowaniem na krwinkach czerwonych pewnych charakterystycznych białek, które określane są mianem antygenów grup krwi. Na erytrocytach występuje wiele swoistych antygenów przez co istnieje wiele układów grup krwi. U człowieka dotychczas opisano 32 takie układy. Najważniejszym jest układ grup głównych (AB0) i układ Rh. Obecność antygeny A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup (A, B, AB, i 0).

Test AB0-trol forte II składa się z plastikowej karty, zawierającej 4 zagłębienia w formie wypustek, które służą jako komory reakcyjne. W każdej z tych komór znajduje się każdorazowo po 70 µl antysurowicy. Po lewej stronie – surowica Anty-A zafarbowana na kolor niebieski, po prawej – surowica Anty-B zafarbowana na kolor żółty. Komory reakcyjne wypełniona antysurowicami zamknięte są przy pomocy przezroczystej folii. Komory przeznaczone są do sprawdzania erytrocytów od pacjentów i erytrocytów od dawców, pod kątem zgodności AB0.

Wielkość opakowania:

- 50 kart

Próbka: krew z antykoagulantami, krew nierozcieńczona, koncentrat krwinek czerwonych

Kto może zakupić testy.

Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne podając numer wykonywania zawodu, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanego zawodu, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie. Niektóre zawody wymagają pisemnej zgody pacjenta na przebicie palca.

W przypadku zakupu przez osoby nieuprawnione, zamówienie będzie anulowane a ewentualne wpłaty pieniędzy zwracane POMNIEJSZONIE o koszty obsługi płatności, wyszczególnione podczas zakupu. Zakupu także może dokonać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zakupu jednocześnie bierze odpowiedzialność za dalsze losy produktu, w tym braku możliwości używania przez osoby nieuprawnione.

Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkownikami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

