

Link do produktu: <https://redmed.pl/acon-mission-ptinr-testy-48-paskow-pomiar-krzepliwosci-p-1788.html>

acon MISSION PT/INR Testy - 48 pasków - pomiar krzepliwości

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	MISSION PT/INR 48szt
Producent	Pozostali producenci

Opis produktu

Paski testowe do analizatora Mission® PT/INR do pomiaru czasu krzepnięcia krwi oraz INR w próbkach świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca lub świeżej pełnej krwi żyłnej nie zawierającej antykoagulantu. System przeznaczony do samokontroli oraz do użytku profesjonalnego u pacjentów poddanych terapii antykoagulacyjnej, po wymianie zastawki, z migotaniem przedsionków, z zatorowością płucną.

Opakowanie 48 pasków testowych Mission® PT/INR

Paski testowe Mission® PT/INR, przy stosowaniu z urządzeniem Mission® PT/INR, umożliwiają dokładny pomiar czasu protrombinowy (PT) oraz wartość międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) w próbkach świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca lub świeżej pełnej krwi żyłnej nie zawierającej antykoagulantu. Po włożeniu zgodnie z instrukcją paska testowego do urządzenia, należy nanieść próbkę krwi na specjalny obszar zaznaczony na pasku testowym. Aparat automatycznie wykrywa obecność próbki na pasku i inicjuje upływ czasu testowego. Membrana paska zawiera odczynniki potrzebne do rozpoczęcia reakcji krzepnięcia. Czas od początkowego wykrycia próbki do pojawienia się odpowiedzi na sygnał fluorescencyjny jest wykorzystywany do obliczania czasu protrombinowego oraz wartości INR podanej próbki krwi.

Do wykonania pomiaru wystarcza jedna wisząca kropla krwi kapilarnej pełnej lub 15 µl świeżej pełnej krwi żyłnej.

W Zestawie

- 48 Pasków testowych Mission® PT/INR
- Czip kalibrujący
- Ulotka

Paski testowe należy przechowywać w oryginalnych kopertkach foliowych i opakowaniach.

Paski testowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej lub niższej, od 2°C do 30°C (36°F do 86°F). Paski mogą być przechowywane w chłodziarce.