

Link do produktu: <https://redmed.pl/careplan-vph-rekawice-testowe-do-badania-ph-pochwy-50-sztuk-p-266.html>

Careplan VpH – rękawice testowe do badania pH pochwy - 50 sztuk

Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	YY504102
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Alere Careplan VpH – rękawice testowe do badania pH pochwy

Rękawice Careplan służą do pomiaru pH środowiska pochwy. Jest to foliowa rękawiczka (zakładana na prawą dłoń) z papierkiem wskaźnikowym na palcu wskazującym.

Są one używane przez lekarzy, lecz kobieta może się nimi badać również samodzielnie. Systematyczne przeprowadzanie takiego badania, pozwala na bardzo szybkie wykrycie infekcji pochwy, co umożliwia nam natychmiastowe podjęcie leczenia. To właśnie infekcje pochwy są częstą przyczyną przedwczesnych narodzin dzieci. Stosując te rękawice kobieta zwiększa szansę na donoszenie ciąży do końca.

Prawidłowe pH pochwy wynosi 4,0 – 4,4 (jest to odczyn kwaśny).
Zobojętnianie środowiska (wzrost pH) może być wywołany przez infekcje.

W zestawie z rękawiczkami dołączona jest skala pH, na której każdy stopień pH ma odpowiedni kolor, identyczny z tym który przyjmuje papierek wskaźnikowy w kontakcie z danym pH.

Przebieg badania:

- Nałożyć rękawice Careplan na prawą rękę (osoby leworęczne również)
- Wsadzić palec wskazujący do pochwy na głębokość 2-3 cm
- Nasączyć pasek testowy wydzieliną
- Wyciągnąć palec i porównać odczynnienie z tym ze skali