

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-omron-m6-comfort-funkcja-afib-wykrywania-migotania-predsionkow-p-768.html>



Ciśnieniomierz Omron M6 COMFORT funkcja AFIB wykrywania migotania przedsionków

Numer katalogowy	HEM-7360-E
Kod EAN / GETIN	4015672111745
Producent	Omron

Opis produktu

Wysokiej jakości ciśnieniomierz, wyposażony w funkcję Afib, czyli wykrywanie nieregularnego tętna, które może sugerować migotanie przedsionków. Do tego Technologia Intellisense™, oraz dołączony jest nowoczesny rękaw Intelli Wrap.

Ciśnieniomierz umożliwia pracę w dwóch trybach

Pojedynczy pomiar podczas którego wykrywana jest arytmia,

Tryb AFIB, w którym podczas wykonywanych po sobie trzech kolejnych pomiarach wykrywane jest nieregularne tętno, które może sugerować migotanie przedsionków.

Omron M6 Comfort może pomóc Ci na wczesnym etapie wykryć potencjalne migotanie przedsionków (Afib), często niewykrytą chorobę, która może zwiększyć ryzyko wystąpienia udaru i zatoru serca.

Omron M6 Comfort ma duży wyświetlacz, który umożliwia łatwe odczytanie wyniku pomiaru.

Do ciśnieniomierza dołączony jest nowy typ mankietu Intelli Wrap, zaprojektowany aby zminimalizować wpływ nieprawidłowego założenia. Nowoczesny mankiet ma strefę pomiarową 360 stopni - owija się wokół całego ramienia, więc nawet niedokładna pozycja na ramieniu wciąż daje dokładne pomiary.

Technologia Intellisense™ zapewnia, że rękaw pompowany jest do odpowiedniej wartości, a system podwójnej kontroli zapewnia, że czujnik wykonujący pomiar jest kontrolowany przez drugi czujnik w celu zapewnienia większej dokładności.

Czujnik wykrywa wszelkie ruchy ciała, które mogą unieważnić pomiar w trakcie badania. Jeżeli się pojawi, zdejmij mankiet, odczekaj 2-3 minuty i spróbuj ponownie, starając się nie ruszać.

Ikonka podwyższonego ciśnienia krwi zostanie wyświetlona gdy wartość skurczowego ciśnienia krwi wyniesie 135 mmHg lub gdy wartość rozkurczowego ciśnienia krwi wyniesie 85 mmHg lub gdy wartości ją wyższe.

Kontrola poprawnego założenia mankietu. W przypadku zbyt luźnego założenia mankietu, który może doprowadzić do niewiarygodnych pomiarów wskaźnik zaświeci się na pomarańczowo. Poprawne założenie mankietu sygnalizowane jest wskaźnikiem w kolorze zielonym.

Urządzenie zapamiętuje 100 pomiarów z datą i godziną dla każdego 2 z osobnych użytkowników. Dzięki tej funkcji można łatwo śledzić zmiany ciśnienia w czasie, bez konieczności zapisywania wyników pomiarów na papierze.

Zestaw zawiera

Ciśnieniomierz Omron M6 Comfort

Mankiet Intelli Wrap (22-42 cm)

Baterie (4xAA - LR06)

Instrukcję obsługi w języku polskim 1 i 2

Etui

Zakres pomiaru ciśnienia: 0 - 299 mmHg

Dokładność pomiaru ciśnienia: ± 3 mmHg

Zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń / minutę

Dokładność pomiaru tętna: $\pm 5\%$ wskazywanego odczytu

Rodzaj mankietu: Intelli Wrap Cuff

Materiały wykończenia mankietu: Nylon, poliester, poliuretan

Obwód mankietu: 22 cm - 42 cm
Walidacja kliniczna: tak
Metoda pomiaru: Oscylomertyczna
Funkcja optymalnego ciśnienia w mankiecie: tak
Data i godzina: tak
Funkcja uśredniania pomiarów: tak
Wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia: tak - ikona na ekranie
Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu: tak
Wykrywanie ruchu w czasie badania: tak
Wykrywanie nieregularnego tętna: tak
Wykrywanie migotania przedsionków: tak
Tryb "GOŚCIA": tak
Pamięć użytkowników: 2 osoby
Wyświetlacz LCD: tak
Pamięć: 100 pomiarów z datą i godziną dla każdego użytkownika
Bezprzewodowa transmisja danych: nie
Wartości znamionowe: Prąd stały 6 V 4W
Zasilanie: bateryjne 4 x AA 1.5V (standard) lub opcjonalny zasilacz
Trwałość baterii: około 1000 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych)
Temperatura pracy: +10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 15% - 90% wilgotności względnej
Wymiary ciśnieniomierza (szer. x wys. x gł.): 191 mm x 85 mm x 120 mm, przewód: 750 mm
Wymiary mankietu: 145 mm x 532 mm
Ciężar własny urządzenia: ciśnieniomierz bez baterii: 460 g; mankiet: 163 g
Materiał wykończenia przewodu: polichlorek winylu
Pompowanie: Automatyczne pompowanie za pomocą pompy
Wypuszczanie powietrza: Automatyczny zawór uwalniania powietrza
Klasyfikacja IP: IP 20