

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-exact-pbp2a-profesjonalny-zanurzeniowy-test-wykrywajacy-gronkowca-zlocistego-p-261.html>



Clearview Exact PBP2A - profesjonalny zanurzeniowy test wykrywający Gronkowca Żłocistego

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Numer katalogowy	891-000
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

[Aktualna data ważności](#)

Alere Clearview Exact PBP2A - profesjonalny zanurzeniowy test wykrywający Gronkowca Żłocistego

Test wykrywający białka PBP2A. Ich obecność jest spowodowana przez bakterie szczepu MRSA - Gronkowca Żłocistego opornego na metycylinę.

Szybki test immunochromatograficzny jakościowy do wykrywania białek 2a wiążących penicylinę (PBP2a) bezpośrednio z hodowli izolatów *S. aureus* jako pomoc w przy wykrywaniu opornego na metycylinę bakterii *Staphylococcus S. aureus* (MRSA).

Przebieg badania:

- Do probówki dodajemy 2 krople reagentu 1
- nanosimy kolonie bakterii i mieszamy
- dodajemy 2 krople reagent 2 (jeżeli roztwór nie zmieni barwy to dodajemy jeszcze jedną kroplę reagentu 2)
- w roztworze umieszczamy pasek testowy
- po 5 minutach odczytujemy z niego wynik.

Specyfikacja:

- Czas otrzymania wyniku: 5 minut

Rodzaj pożywki:

Sojowy Agar Trypsynowy z 5% krwi baraniej

- Czulość: 98.2%
- Swoistość: 99.0%

Agar Columbia z 5% krwi baraniej

- Czulość: 99.1
- Swoistość: 99,0%

Mueller Hinton z 1µg oksacyliny

- Czulość: 99.6%
- Swoistość: 99.0%

W zestawie znajduje:

- 25 opakowań zawierających:
 - 1 x test
 - 1 x probówka do ekstrakcji

-
- 1 x odczynnik 1
 - 1 x odczynnik 2
 - 1 x tekturowy statyw
 - 1 x instrukcja