

Link do produktu: <https://redmed.pl/clinitest-rapid-covid-19-antigen-test-1-szt-markowy-szybki-test-sars-cov-2-z-nosa-do-samokontroli-siemens-healthineers-p-1702.html>



CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Test - 1 szt, markowy szybki test SARS-CoV-2 z nosa, do samokontroli, Siemens Healthineers

Cena	16,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	SMN11556545
Kod producenta	11556545
Producent	Siemens Healthineers

Opis produktu

Szybki test antygenowy covid do samokontroli, weryfikacja podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 jest teraz możliwa dla każdego, niemalże bez wychodzenia z domu.

[Specjalna oferta dla Aptek - t: 600 733 633](#)

Pojedynczy test na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Szczegóły produktu

Materiał do badania: wymaz z nosa.

Łatwa procedura testowa

Wynik można odczytać już po upływie 15 minut

Potwierdzone wykrywanie mutacji Omikron

Test Siemens Healthineers CLINITEST Rapid COVID-19 Ag Self-test wykrywa antygen wirusa SARS-CoV-2. Test przeznaczony jest dla jakościowego oznaczania obecności wirusa SARS-CoV-2 z nosa, osób, które podejrzewają u siebie zakażenie wirusem bądź chcą zweryfikować jego brak, przez interakcjami z innymi osobami.

Dostępność testów do samokontroli minimalizuje ryzyko transmisji wirusa zarówno u osób bezobjawowych jak i skąpoobjawowych.* Wysoka czułość testu umożliwia wykrycie antygenu wirusa w materiale z przedniej części nosa.

Test pozwala na uzyskanie wyniku już w czasie 15 min i nie wymaga wysyłania materiału badanego do laboratorium ani

wykorzystania wyspecjalizowanej aparatury diagnostycznej.

Dzięki prostej procedurze oraz możliwości wykonania badania z wymazu z nosa, może być wykonane również przez osoby nieposiadające doświadczenia. Przejrzysta instrukcja obsługi, oraz dostępność instruktażowego materiału VIDEO ułatwiają właściwe i bezpieczne wykonanie procedury pobrania.

Test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test umożliwił identyfikację 97,25% próbek pozytywnych względem COVID-19 i 100% próbek negatywnych względem COVID-19. Ogólna dokładność testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test plasuje się na poziomie 98,73%.

WAŻNE

- Ten test można wykonywać w ciągu pierwszych dziesięciu dni od wystąpienia objawów choroby COVID-19.
- Ten test jest zatwierdzony do użytku w warunkach domowych przez osoby, które ukończyły 12. rok życia. Wymazy z nozdrzy osób poniżej 12 roku życia i powyżej 70 roku życia powinny być pobierane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem.
- Przygotowanie testu zajmuje około 5 minut, a wynik testu należy odczytać po 15 minutach.
- Aby uzyskać prawidłowy wynik, istotne jest ściśle przestrzeganie instrukcji.
- Przed rozpoczęciem testu należy doprowadzić kasetkę testową i roztwór buforowy do temperatury pokojowej (15–30°C).
- Przed wykonaniem testu oraz po wykonaniu testu należy umyć lub odkazić ręce.
- W przypadku wykonywania testu innej osobie należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (np. maseczkę, rękawiczki).

Rzetelny wynik

- **Czułość: 97,25% (95%CI*: 92,17%-99,43%)**
- **Swoistość: 100% (95%CI*: 97,16%-100%)**
- **Ogólna dokładność: 98,73%**

Potwierdzono, że CLINITEST Rapid Covid-19 Antigen Test wykrywa SARS-CoV-2 także wersję Omicron.

Przechowywać w temperaturze 2 - 30 °C

Przed rozpoczęciem testu należy doprowadzić kasetkę testową i roztwór buforowy do temperatury pokojowej (15–30°C).

Test nie podlega zwrotowi ani wymianie

Skład zestawu

- **1 kasetka testowa (każda pakowana w foliową koszulkę, z wkładem zabezpieczającym przed zawilgoceniem)**
- **1 próbkę z odmierzoną ilością buforu służącego do inaktywacji wirusa**
- **1 sterylna wymazówka**
- **1 końcówkę zakraplacz, służącą prawidłowemu naniesieniu materiału badanego na kasetkę**
- **1 instrukcję obsługi w języku Polski**

Wykonanie badania w kilku prostych krokach

Krok 1



Wstaw probówkę do statywu

Wstaw probówkę do statywu dostarczonego z zestawem.

- **W przypadku zestawów ze wstępnie napełnionymi probówkami ekstrakcyjnymi:** usuń foliowe wieczko z górnej części probówki.
- **W przypadku zestawów z fiolkami z roztworem buforowym:** dodaj 10 kropli roztworu buforowego do probówki.

Krok 2



Pobranie próbki z jamy nosowej

1. Ostrożnie włóż dołączoną do zestawu sterylną wymazówkę do nozdrza.
2. Końcówkę wymazówki wsuń na głębokość 2-4 cm do momentu wyczucia oporu. 5 razy obróć wymazówkę w nozdrzu.
3. Używając tej samej wymazówki, powtórz powyższe czynności dla drugiego nozdrza, ponownie obracając wymazówkę 5 razy.
4. Wyjmij wymazówkę z jamy nosowej i postępuj zgodnie z lokalnymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania próbki.

Krok 3



Obracanie wymazówki

Obróć wymazówkę 6+ razy wewnątrz próbówki, dociskając jej końcówkę do dna i boku próbówki.

Krok 4



Inkubacja próbki i nałożenie końcówki zakraplacza

Odstaw próbkę na jedną minutę, po czym kilka razy odciśnij wymazówkę. Następnie ostrożnie wymij i wyrzuć wymazówkę i nałóż końcówkę zakraplacza na probówkę zawierającą próbkę.


Krok 5



Dodawanie próbki na kasetkę testową

Połóż kasetkę płasko, odpowiednio ją opisz i dodaj 4 krople próbki badanej do dołka na próbkę.


Krok 6

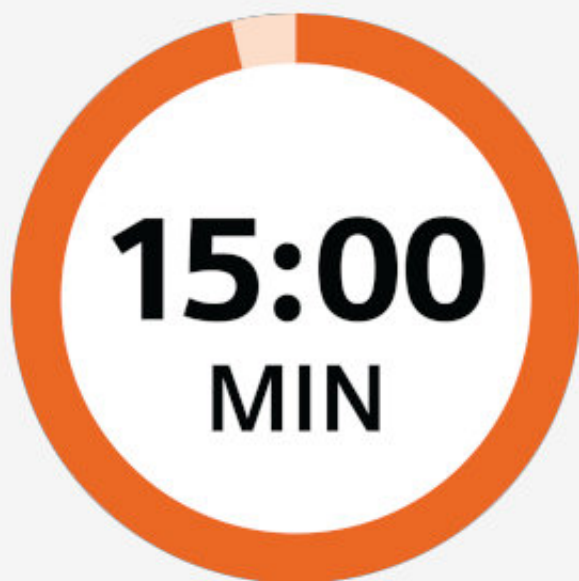

Interpretacja wyniku

Wyniki są gotowe do odczytania po 15 minutach.


Jak interpretować wyniki testu

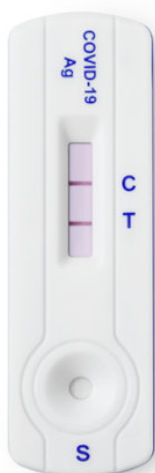

Wynik pozytywny



Wynik Negatywny

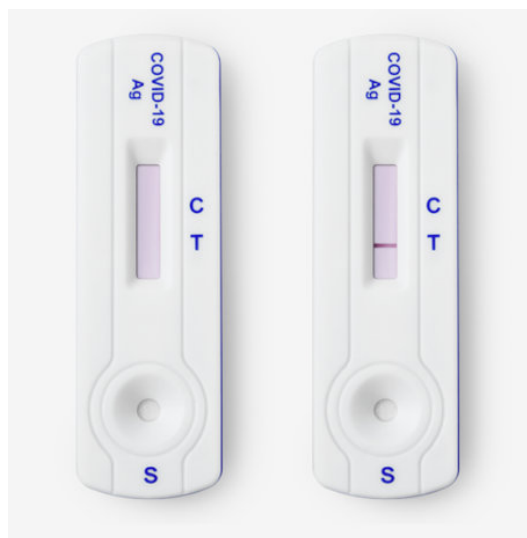

Wynik Nieważny

Jeśli brak jest widocznych linii lub obecna jest tylko jedna linia w obszarze "T", wynik jest nieważny.