

Link do produktu: <https://redmed.pl/covid-19-sars-cov-2-test-przeciwciala-iggigm-opakowanie-5-szt-nakluwacze-pipety-20-l-do-krwi-z-palca-p-1611.html>



COVID-19- SARS-COV-2 test przeciwciała IgG/IgM - opakowanie 5 szt. Nakłuwacze, pipety 20 µl do krwi z palca

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	SOYcov102-5
Kod producenta	cov102-5
Producent	Medtrum

Opis produktu

Opakowanie 5 szt. szybkich testów do wykrywania przeciwciał IgG/IgM przeciw koronawirusowi SARS-COV-2. Zestaw zawiera GRATIS 5 nakłuwaczy. Do użytku profesjonalnego pakowane. One step rapid test device 2019-nCoV IgG/IgM.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego. W przypadku zakupu do użytku domowego (na paragon) zamówienie zostanie anulowane.

Testy Zgodne z Zarządzeniem 187/2020/DSOZ z dn. 25.11.2020 Prezesa NFZ do celów refundacji.



Uzyskanie wyniku w ciągu 15 min.
Wyniki z krwi pełnej, osocza, surowicy,
W zestawie 5 nakłuwaczy i 5 pipet.

Szybki test 2019-nCoV IgG/IgM (krew pełna / surowica / osocze) to chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania antygenów IgG i IgM przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza w celu stwierdzenia infekcji pierwotnych lub wtórnych COVID-19.

Kapilary 20 µl

W celu zwiększenia dokładności przeprowadzonego badania zaleca się, aby stosować do przenoszenia próbki z palca lub żyły profesjonalne kapilary - pipety o pojemności 20 µl. Użycie kapilar pozwala na szybkość poboru próbki, dokładność, wydajność i oszczędności - szczególnie w zastosowaniach, w których wymagane są ściśle określone objętości próbek jak w przypadku testów na obecność przeciwciał koronawirusa.

Reakcje krzyżowe

Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna / surowica / osocze) wykorzystano do analizy pozytywnych próbek antygenów wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B, wirusa RSV, wirusa Adeno, wirusa HBV, bakterii syfilisu, bakterii H. Pylori, wirusa HIV oraz wirusa HCV. Wyniki pokazują brak reakcji krzyżowych. Substancje interferujące Następujące substancje interferujące zostały dodane do próbek z negatywną i pozytywną obecnością wirusa SARS-CoV-2:


Jakość

Skuteczność kliniczna dla przeciwciała IgM

Ogółem przebadano 146 próbek od pacjentów, u których wykonano testy szybkim testem IgG / IgM **nCoV-2019** oraz w referencyjną metodą RT-PCR.

Skuteczność kliniczna dla przeciwciała IgG

Ogółem przebadano 156 próbek od pacjentów u których wykonano testy szybkim testem IgG / IgM **nCoV-2019** oraz w referencyjną metodą RT-PCR.

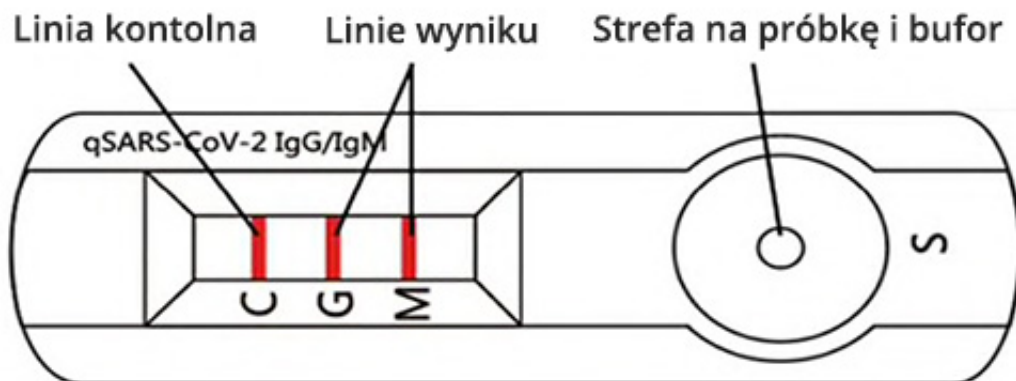

Zawartość zestawu:

- 5 szt. testów pakowanych indywidualnie w folie.
- GRATIS 5 nakłuwaczy
- 1 butelka buforu
- **kapilary 20 µl - 5 szt. - jako opcja jeżeli zostanie wybrana.**

Kto może zakupić testy.

Zakupu może dokonać podmioty wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne podając **numer wykonywania zawodu**, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanego zawodu, w tym: lekarze, laboranci, farmaceuci, pielęgniarki, weterynarze, felczerzy; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w powyższym zakresie. Niektóre zawody wymagają pisemnej zgody pacjenta na przebicie palca.

W przypadku zakupu przez osoby nieuprawnione, zamówienie będzie anulowane a ewentualne wpłaty pieniędzy zwracane POMNIEJSZONIE o koszty obsługi płatności, wyszczególnione podczas zakupu. Zakupu także może dokonać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zakupu jednocześnie bierze odpowiedzialność za dalsze losy produktu, w tym braku możliwości używania przez osoby nieuprawnione.

Zakazane jest nabywanie i użytkowanie wyrobu medycznego przez podmioty nie będące profesjonalnymi użytkownikami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.

Ze względu na fakt, iż produkt jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych nie podlega zwrotowi lub wymianie.

Elementy dodatkowe nie będące w zestawie, nie są konieczne do podstawowego badania

- [Minutnik](#)
- [Wirówka](#)
- [Grube worki na odpady medyczne](#)

Gratis.

Do każdego zamówienia 5 szt. [bezpiecznych sterylnych nakłuwaczy Medlance Plus Extra 2.4mm 21G](#) lub równoznacznych GRATIS.



[Więcej o produkcie](#)

Cena promocyjna wyłącznie przy zakupie z testami na koronawirusa w zestawie z lancetami.

[BIBLIOGRAFIA] 1. World Health Organization (WHO). WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020. 2. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164. 3. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17:181-192. 4. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatki: Nakłuwacze , Minutnik, nakłuwacze , Brak
Kapilaro-pipety: Nie , 20 µl - 5 szt.