

Link do produktu: <https://redmed.pl/covid-19-sars-cov-2-testy-do-uzytku-domowego-przeciwciala-iggigm-opakowanie-2-szt-p-1699.html>



COVID-19- SARS-COV-2 Testy do użyciu domowego - przeciwciała IgG/IgM - opakowanie 2 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	GPCG2057-2D
Kod producenta	covid-19 CG2057-2D
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Opakowanie 2 szt. szybkich testów do wykrywania przeciwciał IgG/IgM przeciw koronawirusowi SARS-COV-2. One step rapid test device 2019-nCoV IgG/IgM.



Uzyskanie wyniku w ciągu 15 min.
Wyniki z krwi pełnej, osocza, surowicy,
W zestawie 2 testy, 2 nakłuwacze i 2 pipety.

Szybki test 2019-nCoV IgG/IgM (krew pełna / surowica / osocze) to chromatograficzny test immunologiczny do jakościowego wykrywania antygenów IgG i IgM przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza w

celu stwierdzenia infekcji pierwotnych lub wtórnych COVID-19.

Kapilary 20 µl

W celu zwiększenia dokładności przeprowadzonego badania zaleca się, aby stosować do przenoszenia próbki z palca lub żyły profesjonalne kapilary - pipety o pojemności 20 µl. Użycie kapilar pozwala na szybkość poboru próbki, dokładność, wydajność i oszczędności - szczególnie w zastosowaniach, w których wymagane są ściśle określone objętości próbek jak w przypadku testów na obecność przeciwciał koronawirusa.

Reakcje krzyżowe

Szybki test na COVID-19 IgG/IgM (krew pełna / surowica / osocze) wykorzystano do analizy pozytywnych próbek antygenów wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B, wirusa Adeno, wirusa HBV, bakterii syfilisu, bakterii H. Pylori, wirusa HIV oraz wirusa HCV. Wyniki pokazują brak reakcji krzyżowych. Substancje interferujące Następujące substancje interferujące zostały dodane do próbek z negatywną i pozytywną obecnością wirusa SARS-CoV-2:


Jakość

Skuteczność kliniczna dla przeciwciała IgM

Ogółem przebadano 146 próbek od pacjentów, u których wykonano testy szybkim testem IgG / IgM **nCoV-2019** oraz w referencyjną metodą RT-PCR.

Skuteczność kliniczna dla przeciwciała IgG

Ogółem przebadano 156 próbek od pacjentów u których wykonano testy szybkim testem IgG / IgM **nCoV-2019** oraz w referencyjną metodą RT-PCR.

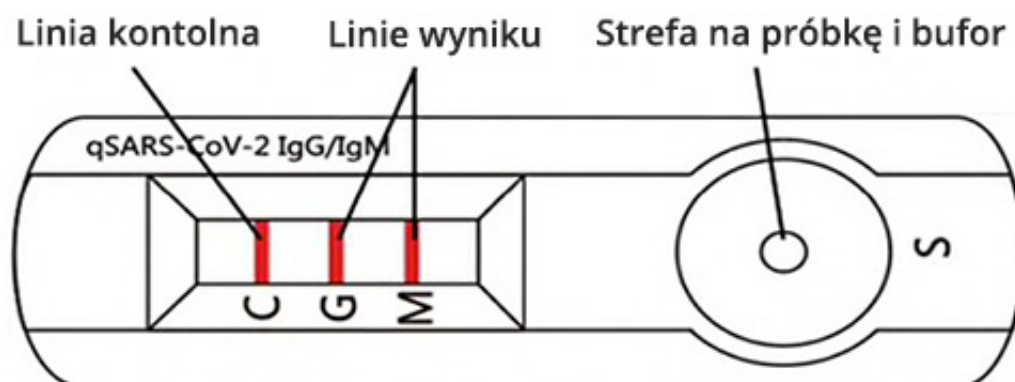

Zawartość zestawu:

- 2 szt. testów pakowanych indywidualnie w folie.
- 1 butelka buforu
- 2 nakłuwacze
- 2 pipety

Elementy dodatkowe nie będące w zestawie, nie są konieczne do podstawowego badania

- [Minutnik](#)

[BIBLIOGRAFIA] 1. World Health Organization (WHO). WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. Beijing: WHO; 9 Jan 2020. 2. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164. 3. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019; 17:181-192. 4. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502.