

Link do produktu: <https://redmed.pl/defibrylator-treningowy-samaritan-pad-350p-trainer-p-772.html>



Defibrylator treningowy Samaritan PAD 350P Trainer

Opis produktu

Defibrylator treningowy ze zdalnym sterowaniem

Łatwy w obsłudze trenażer do defibrylacji PAD Trainer ze zdalnym sterowaniem, prowadzi użytkowników przez symulowaną analizę, podanie energii elektrycznej i procedurę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), wiernie odwzorowując wygląd i działanie defibrylatora do użytku publicznego PAD 350P, ale bez podawania wstrząsu elektrycznego.

Wskazówki głosowe i graficzne oraz polecenia RKO są identyczne z wydawanymi przez defibrylator Samaritan PAD. Identyczne są również rozmiary i kształt. Wyraźne oznakowanie i kolor membrany zapobiegają omyłkowemu użyciu trenażera w sytuacji faktycznego zagrożenia życia lub zdrowia. Trenażer może być używany przez pracodawców prywatnych do szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy z użyciem pomocą samaritan PAD. Ponadto odpowiada on wymaganiom zawodowych trenerów, szkolących laików nie znających nawet podstawowych zasad ratownictwa medycznego, jak i trenerów prowadzących szkolenia okresowe dla doświadczonych ratowników.

Trenażer zasilany jest z akumulatora wielokrotnego ładowania. Elektrody są niedrogie i nadają się do wielokrotnego użytku, wiernie odwzorowując wygląd kasety elektrod i baterii Pad-Pak™ używanych w defibrylatorach Samaritan PAD. Wielofunkcyjny pilot pozwala na wybór jednego z sześciu scenariuszy AHA/ERC dla celów demonstracji i szkolenia. Jeden pilot może kontrolować wiele urządzeń szkolnych jednocześnie (w zasięgu do 3-5 metrów / 10-15 stóp). Trenażer jest kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO.



PAD 350P Trainer:

- Łatwa wymiana elektrod i przewodów po każdej sesji skraca czas ponownego przygotowania systemu.
- Na jednym naładowaniu działa do 7 godzin – cały dzień szkolenia. Ponowne ładowanie zajmuje tylko cztery godziny.
- Diody LED wskazują stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizują 1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane).
- Przycisk pauzy tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając trenerowi udzielić dodatkowych informacji.
- Cztery poziomy głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu.
- Sześć zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC.
- W komplecie trzy pary wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego użytku. Nowe elektrody mogą pracować ze wszystkimi modelami fantomów szkoleniowych i łatwiej jest je montować we wkładce.
- Dwadzieścia dziewięć języków ułatwia zrozumienie poleceń trenera w języku użytkownika.

Podstawowe parametry:

- Waga: 0,6 kg
- Akumulator: Wielokrotnego ładowania
- Zawartość zestawu: Pilot z bateriami AAA, Trainer-Pak, ładowarka, miękki futerał z dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny, instrukcja użytkownika oraz trzy pary elektrod treningowych.

