

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-accu-chek-active-p-857.html>

Glukometr Accu-Chek Active

Cena	85,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Active charakteryzuje się dużą szybkością i precyzją pomiaru. System oferuje szybkość i łatwość wykonania pomiaru, precyzję wyników oraz bezpieczeństwo.

Badanie przy użyciu Accu-Chek Active wymaga tylko próbki krwi o objętości 1-2 μ l i trwa tylko 5 sekund. Aby je wykonać wystarczy po prostu wsunąć pasek testowy do aparatu, glukometr automatycznie się włączy, nałożyć krew na pomarańczowe pole testowe, odczytać wynik, a potem wyjąć pasek z aparatu.

Precyzja glukometru Accu-Chek Active została potwierdzona przez niezależny niemiecki Instytut Technologii Cukrzycowych w Ulm (badanie „Ocena dokładności pomiaru 27 systemów monitorowania glikemii zgodnych z normą DIN EN ISO 15197; G. Freckmann)

Wyposażony jest w szereg przyjaznych użytkownikowi funkcji.

Glukometr informuje, że do badania użyto testu z przekroczoną datą ważności oraz odpowiednio zaznacza otrzymany wynik. Przy pomocy samego testu paskowego można szybko sprawdzić wiarygodność uzyskanego wyniku porównując zabarwienie okienka kontrolnego na odwrocie testu paskowego ze skalą barwną na folie z testami.

Wewnętrzna pamięć o pojemności do 350 wyników. Pozwala to użytkownikowi na dokonanie analizy średnich wartości w ciągu ostatnich 7, 14 lub 30 dni, możliwość oznaczania wyników przed i po posiłkach oraz wyników specjalnych.

Przesyłanie danych do PC: aparat posiada port podczerwieni, który pozwala na przesyłanie zachowanych wyników wprost do komputera.

Dane techniczne

- Zasada pomiaru: oznaczanie poziomu glukozy w świeżej krwi z naczyń włosowatych metodą reflektofotometrii
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl lub 0,6-33,3 mmol/l
- Wielkość próbki krwi: 1-2 μ l
- Czas pomiaru: ok. 5 sek.
- Wyświetlacz: 96-segmentowy ciekłokrystaliczny ekran LCD z ikonami
- Przesyłanie danych do PC: za pomocą portu podczerwieni
- Zasilanie: 1 bateria (typu CR 2032)
- Pojemność baterii: ok. 1000 pomiarów lub 1 rok
- Automatyczne wyłączanie: po 30 lub 90 sek. w zależności od ostatnio wykonanej czynności
- Pamięć: 350 wyników z oznaczeniem daty i godziny oraz średnie z 7, 14 i 30 dni
- Masa:
 - bez baterii: ok. 55 g
 - bez baterii ok. 60 g

Warunki Pracy

- Temperatura:
 - podczas pomiaru: od +10°C do + 40°C
 - podczas przechowywania bez baterii: od -25°C do +70°C

-
- podczas przechowywania z baterią: od -10°C do +50°C
 - Wilgotność powietrza:
 - podczas pomiaru: do 85% względnej wilgotności
 - podczas przechowywania: do 93% względnej wilgotności
 - Wysokość: do 4000 m n.p.m.
 - Wymiary: 104,5 x 51,5 x 22 mm

Producent: Roche

[Glukometr do pomiaru wykorzystuje paski testowe Accu-Chek Active.](#)