

Link do produktu: <https://redmed.pl/kalibrator-testow-triage-bnp-dla-analizatorow-beckman-coulter-p-1192.html>

Kalibrator testów Triage BNP dla analizatorów Beckman Coulter

Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Quidel

Opis produktu

Kalibratory Triage BNP są przeznaczone do kalibracji testu Triage BNP firmy Quidel do analizatorów immunologicznych z serii Access firmy Beckman Coulter. Test Triage BNP ilościowego oznaczania poziomów stężenia BNP w ludzkim osoczu z EDTA.

Zestaw 6 fiolek 1,5 mL zawierających znane stężeniach analitu w 6 poziomach S0 -S5,

Cel kalibracji

Kalibracja oznaczania ilościowego jest procesem, w którym próbki o znanych stężeniach analitu (tzn. kalibratory oznaczeń) są badane tak, jak próbki pobrane od pacjentów, w celu zmierzenia uzyskanej odpowiedzi. Zależność matematyczna między zmierzonymi odpowiedziami i znanymi stężeniami analitu wyznacza krzywą kalibracji. Taka zależność matematyczna, czyli inaczej krzywa kalibracji, służy do przekształcania wyników pomiarów próbek pacjentów w jednostkach RLU (Relative Light Unit) na konkretne, ilościowe stężenia analitu.

Kalibratory Triage BNP firmy Quidel są dostarczane z uwzględnieniem 6 poziomów: zerowego oraz ok. 25, 100, 500, 2500 i 5000 pg/mL.

Dane kalibracyjne oznaczeń zachowują ważność przez maksymalnie 28 dni.

Kalibratory należy przetestować podwójnie.