

Link do produktu: <https://redmed.pl/markowe-szybkie-testy-sars-cov-2-5-szt-clinitest-rapid-covid-19-antigen-wymaz-z-nosa-do-samokontroli-siemens-healthineers-p-1703.html>



Markowe Szybkie Testy SARS-COV-2 5 szt. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen, wymaz z nosa, do samokontroli, Siemens Healthineers

Cena	99,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	SMN11556329
Kod producenta	11556329
Producent	Siemens Healthineers

Opis produktu

Szybki test antygenowych do samokontroli, weryfikacja podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 jest teraz możliwa dla każdego, niemalże bez wychodzenia z domu.

[Specjalna oferta dla Aptek - t: 600 733 633](#)

5 kasetek testowych na obecność białek wirusa wywołującego chorobę COVID-19 z wymazów z nosa.

Zalety Testu

Materiał do badania: wymaz z nosa.

Łatwa procedura testowa

Wynik można odczytać już po upływie 15 minut

Potwierdzone wykrywanie mutacji Omikron

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test jest przeznaczony do wspomagania szybkiego rozpoznawania zakażeń koronawirusem. Może być wykorzystywany do badań przesiewowych osób objawowych i bezobjawowych oraz osób z obszarów o niskiej częstości występowania zakażeń. Jeśli objawy utrzymują się pomimo negatywnego wyniku testu, zalecane jest zasięgnięcie porady lekarskiej.

Test bocznego przepływu, przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu w postaci białka nukleokapsydu wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus, nazywany również wirusem wywołującym chorobę COVID-19) w wymazach bezpośrednich z nosa.



Wymazy z nozdrzy osób poniżej 12. roku życia i powyżej 70. roku życia powinny być pobierane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem.

Test pozwala na uzyskanie wyniku już w czasie 15 min i nie wymaga wysyłania materiału badanego do laboratorium ani wykorzystania wyspecjalizowanej aparatury diagnostycznej.

Dzięki prostej procedurze oraz możliwości wykonania badania z wymazu z nosa może być wykonane również przez osoby nieposiadające doświadczenia.

Test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test umożliwił identyfikację 97,25% próbek pozytywnych względem COVID-19 i 100% próbek negatywnych względem COVID-19. Ogólna dokładność testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test plasuje się na poziomie 98,73%.

Koronawirus może wywoływać ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego nazywaną chorobą COVID-19. Obecnie głównym źródłem zakażenia są osoby zakażone koronawirusem; osoby zakażone mogą być źródłem zakażenia, nawet jeśli nie występują u nich objawy. Według najnowszych danych epidemiologicznych okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby wynosi od 1 do 14 dni, w większości przypadków od 3 do 7 dni. Główne objawy zakażenia to gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. W rzadkich przypadkach stwierdza się nieżyt nosa, katar, ból gardła, ból mięśni i biegunkę.

Zostało potwierdzone, że test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen wykrywa SARS-CoV-2 także wersję Omicron

Rzetelny wynik

- **Czułość: 97,25% (95%CI*: 92,17%-99.43%)**
- **Swoistość: 100% (95%CI*: 97,16%-100%)**
- **Ogólna dokładność: 98,73%**

Przechowywać w temperaturze 2 - 30 °C

Przed rozpoczęciem testu należy doprowadzić kasetkę testową i roztwór buforowy do temperatury pokojowej (15 – 30°C).

Test nie podlega zwrotowi ani wymianie

Skład zestawu

Opakowanie zbiorcze zawierające

- 5x kasetka testowa (każda pakowana w foliową koszulkę, z wkładem zabezpieczającym przed zawilgoceniem)
- 5x próbkówkę z odmierzoną ilością buforu służącego do inaktywacji wirusa
- 5x sterylna wymazówka
- 5x końcówkę zakraplacz, służącą prawidłowemu naniesieniu materiału badanego na kasetkę
- 1 instrukcja użytkowania
- 1 skrócona instrukcja obsługi

Zamiennie w zależności od stanów magazynowych wysyłamy 5 pojedynczych [testów covid 19 Clinitest antigen Siemens](#).

Wykonanie badania w kilku prostych krokach

Krok 1



Wstaw probówkę do statywu

Wstaw probówkę do statywu dostarczonego z zestawem.

- **W przypadku zestawów ze wstępnie napełnionymi probówkami ekstrakcyjnymi:** usuń foliowe wieczko z górnej części probówki.
- **W przypadku zestawów z fiolkami z roztworem buforowym:** dodaj 10 kropli roztworu buforowego do probówki.

Krok 2



Pobranie próbki z jamy nosowej

1. Ostrożnie włóż dołączoną do zestawu sterylną wymazówkę do nozdrza.
2. Końcówkę wymazówki wsuń na głębokość 2-4 cm do momentu wyczucia oporu. 5 razy obróć wymazówkę w nozdrzu.
3. Używając tej samej wymazówki, powtórz powyższe czynności dla drugiego nozdrza, ponownie obracając wymazówkę 5 razy.
4. Wyjmij wymazówkę z jamy nosowej i postępuj zgodnie z lokalnymi instrukcjami dotyczącymi przetwarzania próbki.

Krok 3



Obracanie wymazówki

Obróć wymazówkę 6+ razy wewnątrz próbówki, dociskając jej końcówkę do dna i boku próbówki.

Krok 4



Inkubacja próbki i nałożenie końcówki zakraplacza

Odstaw próbkę na jedną minutę, po czym kilka razy odciśnij wymazówkę. Następnie ostrożnie wymij i wyrzuć wymazówkę i nałóż końcówkę zakraplacza na probówkę zawierającą próbkę.


Krok 5



Dodawanie próbki na kasetkę testową

Połóż kasetkę płasko, odpowiednio ją opisz i dodaj 4 krople próbki badanej do dołka na próbkę.


Krok 6

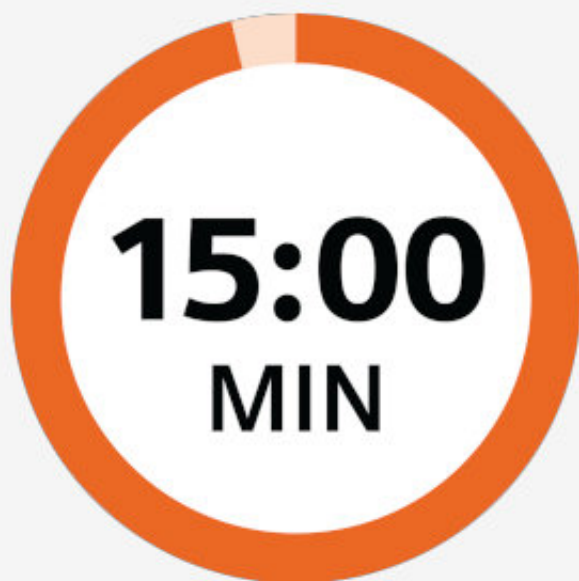

Interpretacja wyniku

Wyniki są gotowe do odczytania po 15 minutach.


Jak interpretować wyniki testu

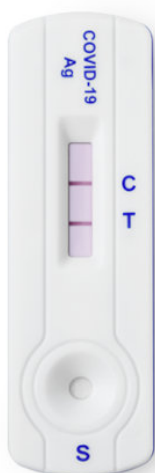

Wynik pozytywny



Wynik Negatywny

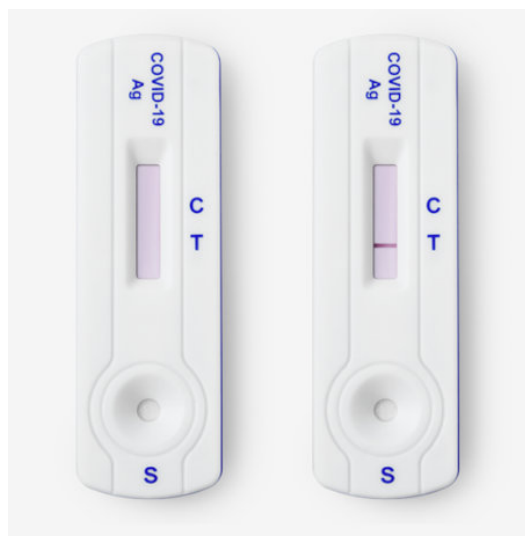

Wynik Nieważny

Jeśli brak jest widocznych linii lub obecna jest tylko jedna linia w obszarze "T", wynik jest nieważny.