

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacz-xinda-sumbow-medical-p-628.html>

Nakluwacz Xinda Sumbow Medical

Cena

40,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

W przypadku kiedy nie będzie na stanie oryginalnego produktu będzie wysyłany zamiennik - nakluwacz Droplet®.

Wskazania

Przyrząd ten wyposażony jest w ostrze i służy do nakłuwania palca w celu pobrania krwi. Jest znany na całym świecie, gdyż pasuje do niego większość ostrzy. Stosuje się go bezpiecznie do pobierania próbek krwi w szpitalach i domach ludzi chorych na cukrzycę.

Sposób użycia:

1. Odkręcić końcówkę (z regulacją głębokości nakłucia) i umieścić ostrze w uchwycie.
2. Usunąć końcówkę ochronną ostrza.
3. Ustawić głębokość nakłucia przekręcając końcówkę w lewo lub w prawo ustawiając strzałkę na odpowiedniej wartości. Większa cyfra oznacza głębsze nakłucie i większą próbkę krwi.
4. Nacisnąć sprężynę nakłuwacza pociągając za koniec obudowy.
5. Po naciągnięciu do oporu puścić końcówkę obudowy.
6. Przyłożyć nakluwacz do palca przyciskając go lekko. Następnie nacisnąć przycisk, który zwolni sprężynę i spowoduje nakłucie.

Uwagi:

Po wykonaniu nakłucia należy nałożyć końcówkę ochroną na igłę i usunąć ją z nakłuwacza

Zamienniki:

[Lancety Droplet 28G - do badania cukru.](#)

[Lancety Droplet 33G - super cienkie do badania glukozy.](#)

[Nakluwacz Droplet do lancet.](#)