

Link do produktu: <https://redmed.pl/nakluwacze-acti-lance-special-7143-nozyk-17g-2-0-mm-200-szt-p-1266.html>

Nakłuwacze Acti-Lance Special 7143, nożyk 17G; 2,0 mm - 200 szt

Cena	99,90 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	HTL7143
Kod producenta	7143
Kod EAN / GETIN	5901549097122
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Bezpieczne lancety Acti-Lance® Special zapewnia większe próbki krwi dla najróżniejszych celów klinicznych. Ostrze Acti-Lance® Special doskonale nadaje się również do nakłucia pięty noworodka, a także palców u dorosłych, w przypadkach, w których badanie wymaga większej ilości krwi.

Opakowanie 200 sztuk

Sterylnie bezpieczne lancety Acti-Lance® to jednorazowe narzędzia medyczne przeznaczone do uzyskania próbek krwi kapilarnej z opuszka palca pacjenta. Mają zastosowanie w profesjonalnej opiece medycznej. Mogą być również stosowane na użytek własny pacjentów.

Parametry Acti-Lance® Universal

- Nożyk 17G (1,5 mm)
- Głębokość nakłucia 2,0 mm



Najważniejsze funkcje lancet Acti-Lance®

- Intuicyjna aktywacja górnego przycisku - wklęsła konstrukcja dopasowana do kształtu kciuka, przycisk stale wciśnięty po użyciu (wskazuje aktywację do rozróżnia między używaną i nieużywaną lancetom).
- Łatwy w obsłudze - intuicyjna aktywacja, do użycia wymagana jest mała siła, nie wymaga ładowania lancetów, tylko 2-etapowa operacja.
- Korpus w kształcie litery V - wygodne wgłębienie na palce i stabilny chwyt w dłoni użytkownika.
- Zamknięty korpus - zapewnia, że igła pozostaje bezpiecznie wewnątrz urządzenia przed i po użyciu, co w pełni chroni zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
- Niezawodna sterylna zatyczka - całkowicie zakrywa igłę do zaledwie kilku sekund przed testem. Ergonomiczny kształt gwarantuje łatwe obracanie i pociągnięcie podczas przygotowywania do testu.
- Bezpieczny - brak możliwości ponownego użycia.



Stosowanie Acti-Lance

Przekręć i prosto wyciągnij zatyczkę ochronną.

Przyciśnij pewnie Acti-Lance do miejsca nakłucia i uruchom narzędzie przez naciśnięcie kolorowego przycisku na szczycie.

Delikatnie ściśnij okolice nakłucia aby uzyskać odpowiednią ilość próbki krwi.

Bezpieczne lancety Acti-Lance całkowicie eliminuje ryzyko przypadkowego zranienia potencjalnie zainfekowaną igłą i chroni personel medyczny przed patogenami przenoszonymi przez krew. Używanie zwykłych, niezabezpieczonych nakłuwaczy może być potencjalnie śmiertelne.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski