

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-accu-chek-instant-100-szt-p-1239.html>

Paski Accu-Chek Instant 100 szt.

Cena

80,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70

Opis produktu

Paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant przeznaczone do ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej pełnej krwi kapilarnej z palca, dłoni, przedramienia i ramienia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania stężenia glukozy.

Opakowanie 100 szt.

Nowoczesny [glukometr](#) Accu-Chek Instant umożliwia automatycznie przesyłanie za pomocą Bluetooth do aplikacji mobilnej mySugr PRO. Takie połączenie maksymalnie wspiera terapię cukrzycy.

Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr oferuje zaawansowaną funkcjonalność kontroli cukrzycy

- prowadzenie dzienniczka wyników na telefonie,
- przesyłanie raportów,
- kalkulator Bolusa
- przypomnienia o kontroli glukozy na telefonie
- System Accu-Chek Instant spełnia wymogi normy ISO 15197:2013



Specyfikacja techniczna [pasków testowych](#) Accu-Chek Instant

- Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) paska
- Zakres pomiarowy systemu: 10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L)
- Wielkość próbki: 0,6 µL
- Czas trwania pomiaru:
- Sposób przechowywania 30°C

Metoda pomiaru:

Enzym użyty w reakcji na teście paskowym, FAD-zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) wyizolowana z *A. oryzae* przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbkę jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Testy paskowe podają [wyniki](#), które odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Korzystając z glukometru Accu-Chek Instant należy zawsze przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących obchodzenia się z przedmiotami, które mogą być skażone materiałem ludzkiego pochodzenia. Należy przestrzegać przepisów higieny i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym laboratorium lub ośrodku.

Producent: Roche

Glukometry wykorzystują do pomiaru paski testowe do pomiaru glukozy, które są jednorazowego użytku i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne lub bez paskowe. [Safe AQ glukometr i paski są dostępne w e-medical.eu. Bezpieczne, wysokiej jakości lancety i nakłuwacze można kupić w medyczny365.pl](#)