

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-chusteczki-reflotron-clean-check-konserwacja-fotometru-refleksyjnego-15-szt-p-477.html>



paski chusteczki reflatron clean + check konserwacja fotometru refleksyjnego 15 szt

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	11142577196
Producent	Roche

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Reflatron® Control Clean + Check jest zestawem do kontroli, czyszczenia i konserwacji systemu optycznego fotometru refleksyjnym Reflotron® firmy Roche.

Chusteczki pakowane w pojedyncze opakowania stosuje się do czyszczenia systemu pomiarowego. Czyszczenie powinno nastąpić po wyświetleniu komunikatu o konieczności wykonania czyszczenia na urządzeniu. Komunikat taki pojawia się po 7 dniach bądź 100 pomiarach. Po wykonaniu czyszczenia urządzenie należy ponownie włączyć i włożyć pasek testowy Clean + Check.

Poprawny pomiar pokazuje wartości mieszczące się w granicach podanych na opakowaniu.

Systemy Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenia. Pozwalają one na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. Systemy te dostarczają szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

Wielkość opakowania:

- 15 pasków kontrolny
- 16 chusteczek do czyszczenia
- 1 instrukcja obsługi