

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-glukometru-glucodr-auto-50szt-firmy-diather-p-904.html>

Paski glukometru GlucoDr Auto 50szt. firmy Diather

Cena	35,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN / GETIN	8806128327010

Opis produktu

Paski glukometru GlucoDr Auto 50szt. firmy Diather

Testy do wyłącznego wykorzystania w [glukometrze GlucoDr auto](#), do monitorowania stężenia glukozy we krwi.

Opakowanie zawiera 50 pasków testowych (2 fiołki x 25 testów).

Paski testowe do glukometru do ilościowego pomiaru stężenia glukozy we krwi przy pomocy pełnej krwi włośniczkowej. Przeznaczone są do diagnostyki in vitro wykonywanej przez personel medyczny w warunkach klinicznych oraz przez pacjentów w warunkach domowych.

System wykorzystuje funkcję Auto-coding, czyli automatyczne kodowanie pasków testowych na glukometrze. Eliminuje to potencjalne błędy użytkownika związane z koniecznością ręcznego wprowadzania numeru kodu.

Cechy pasków testowych:

- Zakres pomiarowy: 10-900 mg/dL
- Próbką: 0,5 µl krwi
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Skład:
- Dehydrogenaza glukozowa, żelazocyjanek potasu, substancja wiążąca, stabilizator.

Używanie:

Potwierdź prawidłowość autokodu. Numer autokodu na wyświetlaczu glukometru powinien być identyczny z numerem autokodu nadrukowanym na etykiecie fiołki aktualnie używanych pasków testowych.

Wsuń pasek testowy do glukometru i przyłóż kroplę krwi do złotej, bocznej krawędzi paska testowego. Wynik zostanie wyświetlony w ciągu 5 sekund.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu.

Wszystkie paski należy wykorzystać w ciągu 4 miesięcy po otwarciu fiołki.

Producent: Diather