

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-lactate-scout-4-72-sztop-test-kwasu-mlekowego-p-1449.html>

Paski Lactate Scout 4 - 72 szt/op - test kwasu mlekowego

Cena	756,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	EKF Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Paski testowe do urządzenia Lactate Scout 4 do pomiaru stężenia mleczanu we krwi.

Opakowanie 72 pasków testowych (3 fiolki po 24 szt.) do pomiaru kwasu mlekowego.

Paski automatycznie pobierają zalecaną objętość próbki do analizy.

Zaawansowana konstrukcja paska ma zamkniętą część w której dochodzi do analizy próbki krwi. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko przypadkowej infekcji osób trzecich i zanieczyszczenia próbki.

Objętość próbki o objętości tylko 0,2 µl.



Przechowywanie

- Gwarantowany termin ważności pasków w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynosi 6 miesięcy. Po otwarciu pudełka należy zużyć paski w ciągu 90-ciu dni.
- Paski testowe muszą być zawsze przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nigdy nie mieszać pasków testowych od różnego opakowania! Po wzięciu paska z opakowania należy natychmiast zamknąć pudełko!
- Ważną rzeczą jest, aby chronić paski od wilgoci, światła oraz nie przechowywać pasków zbyt długo w temperaturze powyżej +25 C. Jeżeli paski są przechowywane w lodówce (poniżej +7 C), należy pamiętać, że przed użyciem powinno się je trzymać zamknięte w opakowaniu, co najmniej przez 20 minut w temperaturze pokojowej.