

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-pts-panels-lipids-cardiochek-pa-i-cardiochek-plus-test-tc-hdl-tg-ldl-tchdl-15-szt-panel-profil-lipidowy-p-119.html>



Paski PTS Panels Lipids, CardioChek PA i CardioChek Plus, test TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL - 15 szt. Panel Profil Lipidowy

Cena	253,80 zł
Cena poprzednia	324,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS1710
Kod producenta	Panel Lipidowy
Kod EAN / GETIN	381931710016
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS001710-HX

Opis produktu

Opakowanie 15 pasków Panelu Lipidowego przeznaczone wyłącznie dla CardioChek PA. Otrzymujemy ilościowy pomiar trzech parametrów przy pomocy jednego testu: cholesterol całkowity, cholesterol HDL i trójglicerydy, dodatkowo przy użyciu pasków otrzymujemy obliczony cholesterol LDL i obliczony stosunek cholesterolu całkowitego do HDL. Badanie z próbki krwi o objętości 40 µL, pobranej z palca lub żyły pacjenta.

Zestaw zawiera:

- 15 pasków testowych CardioChek Panel Lipidowy,
- 1 MemoChip, procesor kalibrujący,
- instrukcja obsługi PL, + 6 innych języków

Zakres pomiarowy:

- cholesterol całkowity (TC): 100-400mg/dl lub 2,59-10,36mmol/l
- cholesterol HDL: 20-120 mg/dL (0.52-3.11 mmol/L)
- trójglicerydy (TG): 50-500mg/dl lub 0,56-5,65mmol/l
- cholesterol LDL 50-200mg/dl lub 1,30-5,18mmol/l

Jednostkę wybieramy przed badaniem.

Jednym testem Zestaw Lipidowy uzyskamy 5 parametrów bio-chemicznych, z jednej kropli krwi w czasie poniżej 2 minut. Uzyskane wyniki:

- cholesterol całkowity (TC),
- cholesterol HDL lipoproteiny dużej gęstości, (dobry cholesterol)
- trójglicerydy (TG),
- obliczony cholesterol LDL,
- obliczony stosunek TC/HDL

Wyniki będą wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia, istnieje możliwość wydruku na samoprzylepnych etykietach, podłączając specjalną drukarkę CardioChek.



Deklaracja zgodności:Urządzenie CardioChek PA spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Opcjonalnie:

- pipety 40ul, 16 szt./op.

Ograniczenia:

- EDTA i heparyna w próbkach do pobierania krwi żyłnej nie mają wpływu na wyniki na pasku testowym.
- Dopamina i metylodopa zmniejszały wyniki wszystkich lipidów.
- Niezwykle wysokie dawki kwasu askorbinowego (witaminy C) zmniejszają wyniki wszystkich lipidów.
- Nie zaobserwowano efektu hematokrytu w próbkach między 30 a 45% HCT.
- Ten produkt nie był testowany przy użyciu krwi noworodków. Tego systemu testowego nie należy używać z tymi próbkami.
- Kosmetyki takie jak kremy do rąk lub płyny często zawierają glicerol. Stosowanie tych produktów może powodować niedokładne wyniki.
- Wyświetlane wyniki są zaokrąglane.

UWAGA !

Paski testowe działają wyłącznie w glukometrze CardioChek PA lub CardioChek Plus. Paski nie działają z CardioChek standard.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pipety 40μl./16szt.: 1op. (+ 13,50 zł), nie potrzebuję