

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-qlabs-na-sztuki-z-micropoint-do-q1-q2-q3-do-pomiaru-inr-z-palca-migotanie-przedsionkow-wymiana-zastawki-zatorowosc-plucna-p-830.html>



Paski qLabs na sztuki z Micropoint do Q1 Q2 Q3 do pomiaru INR z palca, migotanie przedsionków, wymiana zastawki, zatorowość płucna,

Cena	19,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQS-1-1
Kod producenta	SQ-1-01
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	29-07-2025
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Jednorazowy pasek testowy dla analizatora qLabs® do pomiaru INR i PT. Do wykonania badania wystarczy mała kropla krwi kapilarnej. Jest to doskonałe narzędzie do samodzielnego monitorowania krzepliwości krwi, do badań przesiewowych lub punktów medycznych.

Nowoczesna technologia pozwala na uzyskiwanie wyników o bardzo wysokiej precyzji i dokładności, porównywalnej z laboratorium. Wbudowana kontrola jakości daje pewność jakości wyników.

Pakowane są hermetycznie w osobne folie, dzięki którym mają długi okres przydatności, są zabezpieczone przez zanieczyszczeniem i można je składować w temperaturze pokojowej.

System Micropoint qLabs® jest służy do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z świeżej krwi pełnej. System qLabs® Q-1 dostarcza dokładne wyniki w ciągu kilku minut. Monitor do samokontroli w domu i badań diagnostycznych w placówce medycznej. Prosta obsługa, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi.


Pasek testowy qLabs® Q-1

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbką: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia. Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

Testy można kupować wyłącznie po 12 sztuk.

GRATIS!

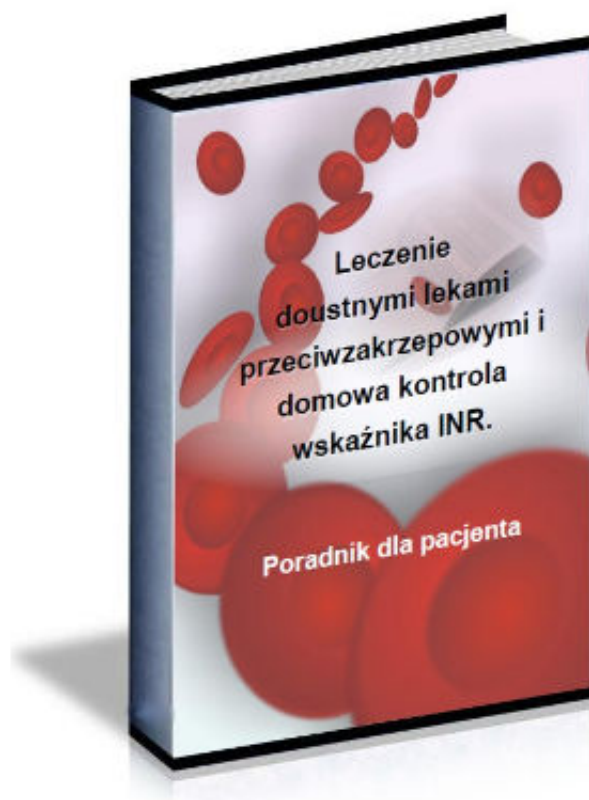

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com