

Link do produktu: <https://redmed.pl/plyn-kontrolny-qlabs-coag-panel-2-test-inr-i-aptt-2-poziomy-odczynnikow-p-1767.html>

Płyn kontrolny qLabs Coag Panel 2, test INR i APTT - 2 poziomy odczynników

Cena	428,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MPQS-4-CL Pro
Kod producenta	QS-4-CL Pro
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Opcjonalny płyn kontrolny dla systemu qLabs® PT-INR.

Płyn jest przeznaczony dla analizatora qLabs® PT-INR oraz pasków testowych qLabs® Coag Panel 2, aby zweryfikować funkcjonowanie systemu i dokładność wyników INR i APTT.

Zaleca się, aby przeprowadzić test przy użyciu dwóch poziomów płynów kontrolnych.

Zestaw płynów zawiera 2 różne poziomy elektrolitów, czynników krzepnięcia, stabilizatorów i konserwantów. Wartości INR i APTT płynów kontrolnych qLabs® są specyficzne dla poszczególnych partii.

Jeśli wyniki testu mieszczą się w zalecanym zakresie wyników kontrolnych INR i APTT podanym na fiolce, system działa prawidłowo oraz wszystkie procedury badania zostały przeprowadzone poprawnie.

Zawartość opakowania:

- 2 x 1 ml płyn poziomu 1
- 2 x 1 ml płyn poziomu 2
- instrukcja

Nieotwarte fiolki są stabilne w temperaturze 18-30° C aż do daty ważności podanej na etykiecie.

Po otwarciu, płyn w fiolkach jest stabilny przez 15 dni, jeśli są szczelnie zamknięte w temperaturze 18-30° C.

Przed wykonaniem testu delikatnie wirować fiolkę kilka razy, aby zapewnić jednorodność płynu.

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com