

Link do produktu: <https://redmed.pl/podkolanowki-360-den-1k-8001-przeciwwylakowe-avicenum-otwarty-czubek-p-178.html>

Podkolanówki 360 DEN, 1K, 8001 przeciwwylakowe Avicenum, otwarty czubek

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	podkolanowki360
Kod EAN / GETIN	8590072312368
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Podkolanówki przeciwwylakowe Avicenum 360

Terapia kompresyjna z pomocą wyrobów II klasy kompresyjnej jest dla pacjentów z dolegliwościami żylnymi niezastąpioną metodą leczniczą. Ciśnienie w okolicy kostek dla tych wyrobów wynosi 23 - 32 mmHg. W przypadku niewydolności żyłnej słabnie ścianka żyły, pogarsza się funkcjonowanie zastawek żylnych i żyły rozszerzają się. Opadający gradient ciśnienia na wyrobach II klasy kompresyjnej pomaga we wspieraniu prawidłowego funkcjonowania zastawek żylnych i stabilizuje krążenie krwi (ułatwia powrót żylny).



Skład: 60% nylon, 40% elastan Lycra



Wykończenie antybakteryjne Sanitized Silver zapewnia: ochronę przeciwko powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, ochronę przeciwko rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni na wyrobach pończochowych, dłuższą trwałość wyrobu (chroni włókno przed jego uszkodzeniem), utrzymanie równowagi biologicznej skóry, higieniczną świeżość wyrobu.

Dostępne rozmiary:


- 1K - otwarte palce

Długość nogi w przypadku podkolanówek A - D:

- 34 - 38 cm = K (krótkie)
- 39 - 43 cm = D (długie)

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Trzeba też precyzyjnie dobrać siłę ucisku, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

a - obwód stopy
 b - obwód w kostce
 b1 - obwód łydki
 c - obwód pod kolanem
 d - obwód nad kolanem
 f - obwód uda
 g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
 t - obwód pasa

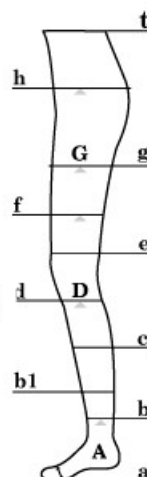

Rozmiar	1	2	3	4	5
a	19-25	22-28	25-31	28-34	31-37
b	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35
b1	25-30	28-33	31-36	34-39	37-42
c	32-38	35-41	38-44	41-47	44-50
d	31-37	34-40	37-43	40-46	43-49

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym
- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żyłaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żyłnej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żyłnej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żyłaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy

- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 8001

czubek otw/zam: czubek otwarty

Rozmiar: 1k