

Link do produktu: <https://redmed.pl/pompa-insulinowa-minimed-paradigm-real-time-722-p-1437.html>



Pompa insulinowa MiniMed Paradigm REAL-TIME - 722

Producent

Medtronic

Opis produktu

Pompa insulinowa MiniMed® REAL-TIME jest kluczowym urządzeniem w Systemie Ciągłego Monitorowania Glikemii.

Dostarczanie informacji w systemie ciągłym jest idealne dla osób, które próbują poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest kontrola zbyt wysokich i niskich wartości glikemii, w tym osób:

Ze skłonnością do niskich nocnych wartości glikemii ("hipoglikemie nocne").

Ze skłonnością do podwyższonych wartości glikemii po posiłkach ("hiperglikemie poposiłkowe").

Doświadczających wysokich wartości glikemii nad ranem ("zjawisko brzasku").

Ciężarnych lub kobiet planujących ciążę.

Terapia za pomocą pompy insulinowej MiniMed® Paradigm REAL-TIME zapewnia:

Wolność od wstrzyknięć wykonywanych wielokrotnie w ciągu dnia.

Swobodę wyboru czasu jedzenia, spania oraz podejmowania aktywności fizycznej.

Lepszą kontrolę glikemii przy mniejszym ryzyku wystąpienia niskich stężeń glukozy we krwi.

Z pompą insulinową MiniMed® REAL-TIME:

Ciągła aktualizacja poziomu stężenia glukozy we krwi.

Określenie wpływu diety, wysiłku fizycznego oraz przyjmowanych leków na wartości glikemii.

Pomoc w zapobieganiu hipo- i hiperglikemiom.

Kalkulatora Bolusa, który na podstawie wprowadzonych ustawień osobistych, spożytych pokarmów oraz aktualnego stężenia glukozy we krwi sugeruje wielkość dawki na bolus.

Menu i obsługa w języku polskim.

Możliwość elastycznego sterowania insuliną we wlewie podstawowym poprzez zastosowanie odpowiednich schematów bazy dopasowanych do standardowego trybu życia, a także do sytuacji wysiłku fizycznego lub dodatkowej choroby. Oprócz tego opcja tymczasowej dawki podstawowej pozwalająca na natychmiastową modyfikację bazy, zmieniana w jednostkach insuliny lub procentach.



Możliwość stosowania wszystkich preparatów szybkodziałających analogów insuliny (Novorapid, Humalog) oraz insuliny krótkodziałających (Actrapid, Humulin R, Gensulin R).

Trzy rodzaje bolusów posiłkowych pozwalających na dopasowanie tempa podawania insuliny w zależności od składu posiłku:

- Bolus prosty - węglowodany
- Bolus przedłużony - białka i tłuszcze
- Bolus złożony - węglowodany + białka i tłuszcze

Możliwość zabezpieczenia:

- zapisania ustawień pompy
- wykonania podstawowych operacji przy użyciu pilota
- blokady przycisków

Alarmy

- tonowy lub wibracyjny
- przypomnienia o pomiarze glukozy
- zbliżającym się wyczerpaniu baterii i zapasu insuliny w zbiorniku

Informacja w formie ikon na ekranie głównym:

- bieżącym stanie baterii
- ilości insuliny w zbiorniku
- godzinie

Pamięć

- Rozbudowana + statystyka. Dane zapamiętane przez pompę informują o:
- rodzaju i wielkości bolusa
- ilości insuliny we wlewie podstawowym
- dobowym zużyciu insuliny
- ilości spożytych wymienników
- średniej glikemii

Pompa MiniMed® Paradigm REAL-TIME 722 kompatybilna jest z glukometrem Contour® Plus Link firmy Bayer, który przesyła dane do pompy drogą radiową. Wszystkie dane dotyczące poziomów glukozy z glukometru oraz dawkowania insuliny przechowywane są w pamięci pompy. Korzystając z oprogramowania CareLink®, wystarczy dokonać transferu danych z pompy do komputera, aby wszystkie informacje mieć w jednym miejscu.

Działanie z komputerem

- współpraca z programem komputerowym za pomocą łącza RF
- możliwość korzystania z internetowego programu CareLink®

W skład zestawu wchodzi:

- Pompa insulinowa MiniMed Paradigm® REAL-time (722)
- Transmitter przekazujący poziomy glukozy do pompy
- Komplet baterii (4 szt.)
- Klips mocujący
- Skórzane etui na pompę



-
- Saszetka podróżna
 - Blokada zbiornika, zaciski na dren
 - Instrukcja obsługi w jęz. Polskim