

Link do produktu: <https://redmed.pl/pompa-insulinowa-minimed-paradigm-veo-754-p-1434.html>

Pompa insulinowa MiniMed Paradigm Veo - 754

Producent

Medtronic

Opis produktu

Pompa insulinowa MiniMed® Veo™ jest osobistym narzędziem wyposażonym w opcję ciągłego monitorowania glikemii. Może się poszczycić wieloma innowacyjnymi funkcjami, które pomagają w łatwej i skutecznej terapii cukrzycowej.

W połączeniu z transponderem MiniLink™ oraz sensorem, pomaga użytkownikom utrzymać poziomy glukozy na stabilnym poziomie przez całą dobę.

Możliwość elastycznego sterowania insuliną we wlewie podstawowym poprzez zastosowanie odpowiednich schematów bazy dopasowanych do standardowego trybu życia, a także do sytuacji wysiłku fizycznego lub dodatkowej choroby. Oprócz tego opcja tymczasowej dawki podstawowej pozwalająca na natychmiastową modyfikację bazy, zmieniana w jednostkach insuliny lub procentach.

Pomiar glukozy

Opcja w pompie, która informuje o poziomie glukozy mierzonym w sposób ciągły przez czujnik pomiaru glikemii (sensor) umieszczony w tkance podskórnej. W zależności od potrzeb Pompa Veo może być używana wraz z opcją CGM bądź bez niej.

Hipoblokada

Pompa Veo stosowana z systemem CGM automatycznie wstrzymuje wlew insuliny w przypadku hipoglikemii.

Bolusy

Na podstawie ustalonych przez lekarza parametrów pompa oblicza dawkę insuliny na posiłek i/lub korektę w przypadku hiperglikemii. Informuje o ilości insuliny znajdującej się w organizmie.

Trzy rodzaje bolusów posiłkowych pozwalających na dopasowanie tempa podawania insuliny w zależności od składu posiłku.

- Bolus prosty - węglowodany
- Bolus przedłużony - białka i tłuszcze
- Bolus złożony - węglowodany + białka i tłuszcze

Insulina

Możliwość stosowania wszystkich preparatów szybko działających analogów insuliny (Novorapid, Humalog) oraz insuliny krótko działających (Actrapid, Humulin R, Gensulin R).

Personalizacja

Każdy pacjent może zaprogramować pracę pompy według własnych potrzeb terapeutycznych. Funkcje zmiennej bazy, kalkulatora bolusa, współpraca z glukometrem Contour® Link - to walory „sprytnej pompy”, dzięki którym leczenie i uzyskanie wyrównania metabolicznego stają się prostsze.

Możliwość zabezpieczenia:

- zapisania ustawień pompy
- wykonania podstawowych operacji przy użyciu pilota
- blokady przycisków

Alarmy tonowe lub wibracyjny

- przypomnienia o pomiarze glukozy
- pominiętym bolusie
- zbliżającym się wyczerpaniu baterii i zapasu insuliny w zbiorniku
- niskim lub wysokim poziomie glukozy
- wczesnego ostrzegania o zbliżającej się hipo- lub hiperglikemii

Ikony Ekranu Głównego

- bieżący stan baterii
- ilości insuliny w zbiorniku
- godzina

Pamięć rozbudowana + statystyka

Dane zapamiętane przez pompę informują o:

- rodzaju i wielkości bolusa
- ilości insuliny we wlewie podstawowym
- dobowym zużyciu insuliny
- ilości spożytych wymienników
- średniej glikemii

Współpraca z glukometrem Contour® Plus Link

Pompa Veo kompatybilna jest z glukometrem Contour® Plus Link, który przesyła dane do pompy drogą radiową. Wszystkie dane dotyczące poziomów glukozy z glukometru oraz dawkowania insuliny przechowywane są w pamięci pompy. Korzystając z oprogramowania CareLink, wystarczy dokonać transferu danych z pompy do komputera, aby wszystkie informacje mieć w jednym miejscu.

Współpraca z komputerem

- możliwość współpracy z programem komputerowym za pomocą łącza RF
- możliwość korzystania z internetowego programu CareLink

W skład zestawu MiniMed Paradigm Veo wchodzi:

- Pompa insulinowa MiniMed ParadigmVeo (754)
- Transmitter przekazujący poziomy glukozy do pompy
- Enlite elektroda enzymatyczna (sensor) - 5 szt.
- Plastry mocujące do transmitera
- 2 zestawy infuzyjne Quickset® 6mm/60cm oraz 9mm/110cm
- 2 rezerwuary na insulinę 3ml
- Glukometr Bayer Contour® Plus Link
- Komplet baterii (4 szt.)
- Quick-serter
- Enlite-serter
- Klips mocujący
- Skórzane etui na pompę
- Saszetka podróżna
- Blokada zbiornika, zaciski na dren
- Instrukcja obsługi w jęz. polskim