

Link do produktu: <https://redmed.pl/ponczochoy-z-samonosna-koronka-360-den-2k-czubek-zamkniety-p-189.html>

Pończochy z samonośną koronką 360 DEN 2K+, czubek zamknięty

Cena	108,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	ponczochoy samonosne z koronka360
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Pończochy z samonośną koronką - 360 DEN

Terapia kompresyjna z pomocą wyrobów II klasy kompresyjnej jest dla pacjentów z dolegliwościami żylnymi niezastąpioną metodą leczniczą. Ciśnienie w okolicy kostek dla tych wyrobów wynosi 23 - 32 mmHg. W przypadku niewydolności żylny słabnie ścianka żyły, pogarsza się funkcjonowanie zastawek żylnych i żyły rozszerzają się. Opadający gradient ciśnienia na wyrobach II klasy kompresyjnej wspiera prawidłowe funkcjonowanie zastawek żylnych i stabilizuje krążenie krwi (ułatwia powrót żylny).



Skład: 60% nylon, 40% elastan Lycra



Wykończenie antybakteryjne Sanitized Silver: zapewnia: ochronę przeciwko powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, ochronę przeciwko rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni na wyrobach pończochowych, dłuższą trwałość wyrobu (chroni włókno przed jego uszkodzeniem), utrzymanie równowagi biologicznej skóry, higieniczną świeżość wyrobu.

Dostępne rozmiary:


- 2k+

Długość nogi w przypadku pończoch A - G:

- 62 - 71 cm = K (krótkie)
- 71 - 82 cm = D (długie)

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Trzeba też precyzyjnie dobrać siłę ucisku, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

a - obwód stopy
b - obwód w kostce
b1 - obwód łydki
c - obwód pod kolaniem
d - obwód nad kolaniem
f - obwód uda
g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
t - obwód pasa

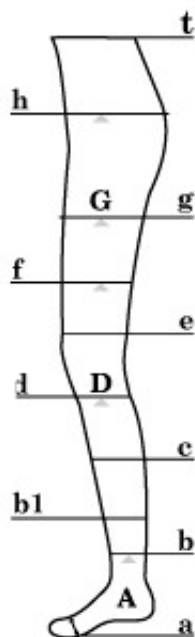

Rozmiar	1	1+	2	2+	3	3+	4	4+	5
a	19-25		22-28		25-31		28-34		31-37
b	20-23		23-26		26-29		29-32		32-35
b1	25-30		28-33		31-36		34-39		37-42
c	32-38		35-41		38-44		41-47		44-50
d	31-37		34-40		37-43		40-46		43-49
e	33-39		36-42		39-45		42-48		45-51
f	40-48	48-56	45-53	53-61	49-57	57-65	53-61	61-69	57-65
g	47-57	57-67	52-62	62-72	57-67	67-77	62-72	72-82	67-77
h	110		120			130			
t	80		90			100			

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym

- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żylniej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żylniej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 8001

czubek otw/zam: czubek zamknięty

Rozmiar: 2k+