

Link do produktu: <https://redmed.pl/prolance-normal-flow-bezpieczny-nakluczacz-21g-1-8-mm-p-1728.html>

Prolance Normal Flow bezpieczny nakłuwacz - 21G / 1,8 mm

Cena	69,98 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	.HTL Strefa

Opis produktu

Bezpieczne nakłuwacze Prolance to sterylne, jednorazowe przybory medyczne przeznaczone do pobierania próbek krwi włośniczkowej. Zamierzonymi użytkownikami są pracownicy służby zdrowia.

Bezpieczny nakłuwacz Prolance Normal Flow: igła 21G (0,82 mm); głębokość nakłucia: 1,8 mm.

Personel medyczny używając bezpiecznych nakłuwaczy minimalizuje się ryzyko przypadkowego ukłucia i infekcje patogenami przenoszonymi przez krew.

Bezpieczne nakłuwacze, w tym Prolance, są integralnym elementem programów zapobiegania urazom ostrymi narzędziami w szpitalach, klinikach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i profesjonaliści muszą czuć się bezpiecznie.

Przezroczystość

Przezroczysty korpus nakłuwacza, aby zobaczyć działanie sprężyny, upewnia użytkownika o prawidłowym działaniu.

Ergonomiczny kształt litery T z dodatkowymi żebrami zapewniającymi pewny chwyt

Oryginalny design dzięki przezroczystemu korpusowi nakłuwacza

Precyzja

Wygodne wgłębienie na palec do aktywacji przyciskiem

Poręczny kształt i brak śliskiej powierzchni lancetu

Żebrowana nasadka ochronna gwarantuje sterylność igły i zapewnia pewny chwyt

Łatwe odkręcanie nasadki

Jak korzystać z Prolance

1. Odkręć nasadkę ochronną i równo wyciągnij.
2. Mocno dociśnij korpus Prolance do miejsca nakłucia i aktywuj przez naciśnięcie górnego przycisku.
3. Aby uzyskać wymaganą objętość krwi, delikatnie wywieraj przerywany nacisk w pobliżu miejsca nakłucia. Zużyty lancet należy wyrzucić do pojemnika na ostre przedmioty zgodnie z wytycznymi zakładu i lokalnymi przepisami.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski