

Link do produktu: <https://redmed.pl/prolance-pediatric-flow-bezpieczny-nakluczacz-ostre-1-2-mm-p-1731.html>



Prolance Pediatric Flow bezpieczny nakłuczacz - ostrze / 1,2 mm

Dostępność

Czekamy na dostawę

Producent

.HTL Strefa

Opis produktu

Bezpieczne nakłuczacze Prolance to sterylne, jednorazowe przybory medyczne przeznaczone do pobierania próbek krwi włośniczkowej. Zamierzonymi użytkownikami są pracownicy służby zdrowia.

Bezpieczny nakłuczacz Prolance Pediatric Flow: ostrze; głębokość nakłucia: 1,2 mm.

Personel medyczny używając bezpiecznych nakłuczaczy minimalizuje się ryzyko przypadkowego ukłucia i infekcje patogenami przenoszonymi przez krew.

Bezpieczne nakłuczacze, w tym Prolance, są integralnym elementem programów zapobiegania urazom ostrymi narzędziami w szpitalach, klinikach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i profesjonaliści muszą czuć się bezpiecznie.

Przezroczystość

Przezroczysty korpus nakłuczacza, aby zobaczyć działanie sprężyny, upewnia użytkownika o prawidłowym działaniu.

Ergonomiczny kształt litery T z dodatkowymi żebrami zapewniającymi pewny chwyt

Oryginalny design dzięki przezroczystemu korpusowi nakłuczacza

Precyzja

Wygodne wgłębienie na palec do aktywacji przyciskiem

Poręczny kształt i brak śliskiej powierzchni lancetu

Żebrowana nasadka ochronna gwarantuje sterylność igły i zapewnia pewny chwyt

Łatwe odkręcanie nasadki

Jak korzystać z Prolance

1. Odkręć nasadkę ochronną i równo wyciągnij.
2. Mocno dociśnij korpus Prolance do miejsca nakłucia i aktywuj przez naciśnięcie górnego przycisku.
3. Aby uzyskać wymaganą objętość krwi, delikatnie wywieraj przerywany nacisk w pobliżu miejsca nakłucia. Zużyty lancet należy wyrzucić do pojemnika na ostre przedmioty zgodnie z wytycznymi zakładu i lokalnymi przepisami.

#KupujŚwiadomie #ProduktPolski