

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-qlabs-48-szt-do-qlabs-q1-q2-q3-monitorinr-wskazniki-inr-pt-test-p-807.html>

paski qLabs 48 szt. do qLabs Q1 Q2 Q3 , MonitorINR wskaźniki INR PT test

Cena	648,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQS-1-24x2
Kod producenta	SQ-1-48
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	21-07-2025
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Jednorazowe paski testowe do pomiaru PT/INR dla analizatora MonitorINR qLabs®. Szybkie, wygodne i proste określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca.

MonitorINR qLabs jest narzędziem do diagnostyki in vitro u pacjentów zażywających doustne leki antykoagulacyjne, przeciwzakrzepowe, którzy potrzebują badać czas krzepnięcia krwi. Krzepnięcie krwi wyraża się jako czas protrombinowy (PT) lub wskaźnik INR.

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.


Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do Monitora INR pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi jest potrzebna jedynie mała próbka krwi z opuszka palca.

Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia.

Paski testowe przeznaczone są do samodzielnej kontroli gęstości krwi przez pacjenta.

Zastosowana nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników.

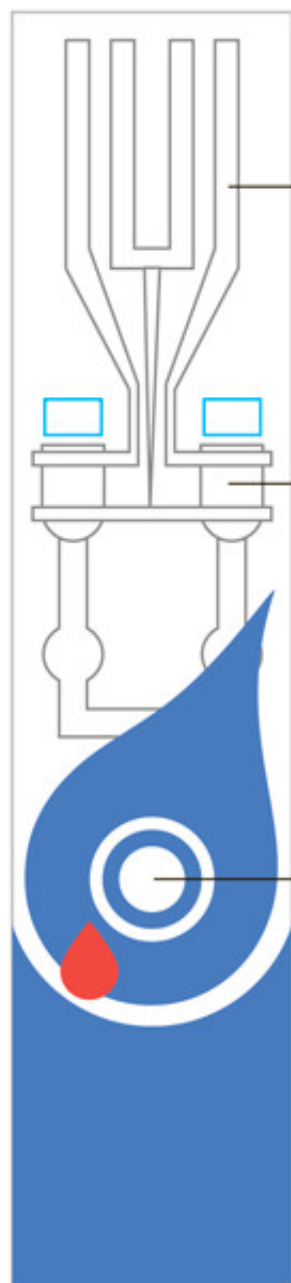

3 Strefa reakcyjna zawiera dwie metalowe elektrody, na których stosuje się stałe napięcie.

2 W strefie reakcyjnej, krew miesza się z odczynnikami aktywującymi krzepnięcie.

1 Kropla krwi, naniesiona na pasek testowy, doprowadza jest kanałami kapilarnymi do strefy reakcyjnej.

MonitorINR qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. MonitorINR oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Cechy paska testowego MonitorINR qLabs® Q-1 PT/INR

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbkę: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s

Znak

CE 0123



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

Zestaw zawiera:

- 2x 24 pasków testowych PT/INR [dwa opakowania po 24 sztuki pasków]
- Polska instrukcja obsługi, w każdym opakowaniu
- kostka kalibrująca w każdym opakowaniu do użycia z modelem qLabs Q3

Każdy pasek testowy zawiera:

- Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.

Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego. Zgodnie z zasadą im wcześniej tym lepiej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nakłuwacze INR: ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G, 1.8mm 10 szt. [HTL7006-10] PROMO (+ 0,27 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com