

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-plyn-kontrolny-do-inr-do-wykonania-kontroli-jakosci-wylacznie-do-uzytku-profesjonalnego-p-1041.html>



qLabs płyn kontrolny do INR do wykonania kontroli jakości, wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Cena	299,70 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MPQS-1-CL Pro
Kod producenta	QS-1-CL Pro
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Opcjonalny płyn kontrolny dla systemu qLabs® PT-INR.

Płyn jest przeznaczony dla analizatora qLabs® PT-INR oraz pasków testowych qLabs® PT-INR, aby zweryfikować prawidłowość działania systemu

Zaleca się, aby przeprowadzić test przy użyciu dwóch poziomów płynów kontrolnych.

Każdy zestaw płynów zawiera różne poziomy elektrolitów, czynników krzepnięcia, stabilizatorów i konserwantów. Wartości INR płynów kontrolnych qLabs® są specyficzne dla poszczególnych partii.

System pracuje poprawnie, a wszystkie procedury testowe zostały wykonane poprawnie, gdy uzyskane wyniki testów mieszczą się w określonym zakresie kontroli INR wydrukowanym na etykiecie fiolki.

Zawartość opakowania:

- 2 x 1 ml płyn poziomu 1
- 2 x 1 ml płyn poziomu 2
- instrukcja

Nieotwarte fiolki są stabilne w temperaturze 18-30° C aż do daty ważności podanej na etykiecie.

Po otwarciu, płyn w fiolkach jest stabilny przez 15 dni, jeśli są szczelnie zamknięte w temperaturze 18-30° C.

Przed wykonaniem testu delikatnie wirować fiolkę kilka razy, aby zapewnić jednorodność płynu.

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com