

Link do produktu: <https://redmed.pl/aparat-do-pomiaru-inr-pt-qlabs-electrometer-q1-pl-analizator-krzepliwosci-krwi-inr-pt-z-funkcja-bluetooth-oraz-polskim-menu-p-1101.html>



Aparat do pomiaru INR PT qLabs ElectroMeter Q1 PL, analizator krzepliwości krwi INR PT, z funkcją bluetooth oraz Polskim menu

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQ-1
Kod producenta	qLabs Q1 POL
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Refundacja NFZ	Tak
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

UWAGA !!! - dostępny jest także ten model [qLabs Q1 Pol z dopłatą, refundacją NFZ klikając w link.](#)

Najnowszy model qLabs® Q1 PL to monitor krzepliwości krwi do szybkiego i precyzyjnego określania wskaźnika INR oraz czasu protrombinowego (PT) z krwi z palca. Posiada menu w języku polskim, oraz nowszy szybszy procesor w porównaniu do wersji qLabs Q-1 EN.

Przeznaczony dla osób, które muszą kontrolować wskaźnik INR, zwłaszcza u osób z **migotaniem przedsionków**, u osób **po wymianie zastawki**, lub u osób **po przebytej zatorowości płucnej** u których włączono terapię doustnymi tradycyjnymi lekami tzw. antykoagulantami.

Najnowszy model qLabs® Q1 PL, w porównaniu do starszych wersji zawiera:

- **najnowsze oprogramowanie firmware które zawiera język polski w menu**
- **10-krotnie większą dokładność, poprzez zwiększenie ilości wyświetlanych liczb po przecinku dla wartości INR**
- **Dodatkowe opcje w menu**
- **3 lata standardowej gwarancji**

Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. Micropoint qLabs® Q1 PL oferuje pacjentom, dostęp do wyników gęstości krwi o jakości laboratoryjnej. Zaawansowana technologia biosensoryczna analizatora umożliwia szybkie wykonanie pomiaru krzepliwości krwi z krwi kapilarnej. System do pomiaru INR jest łatwy i tani w utrzymaniu oraz konserwacji, składa się z przenośnego analizatora do pomiaru INR oraz jednorazowych, indywidualnie pakowanych pasków testowych.

Jednorazowe paski testowe są elementem systemu Micropoint qLabs® Q1 PL. Zastosowanie takiego rozwiązania służy ochronie urządzenia i badanej próbki przed zanieczyszczeniem. Analizator nie wymaga czyszczenia po każdym badaniu, można wykonywać seryjne testy INR.

Do zrobienia badania jest potrzebne jedynie 10 μ L krwi z opuszka palca.

Przygotowanie i wykonanie badania zajmuje niewiele czasu, a wynik PT i INR jest wyświetlany do 90 sekund..

Wbudowana kontrola jakości QC daje pewność jakości wyników, minimalizuje ryzyko nieprawidłowego pomiaru.

Własna pamięć w której może przechowywać aż do 200 ostatnich wyników badań.

Do produkcji obudowy użyto nowocześniejszego tworzywa, oraz zastosowano antypoślizgową niebieską gumową opaskę na obrzeżach urządzenia, dzięki której monitor INR świetnie leży w dłoni.



Bluetooth do bezprzewodowego transferu danych - Funkcja Bluetooth może być wykorzystywana w aplikacjach do przesyłania wyników przez telefon lub komputer do lekarza, od którego uzyskamy informacje o dawce leku lub konsultacji medycznych z zakresu prawidłowej terapii tradycyjnymi lekami antykoagulacyjnymi.

qLabs® Q1 PL ma dodatkowe porty USB i aby można było bez problemu skomunikować analizator z komputerami. Dzięki temu można zapisać wyniki dla wewnętrznych informatycznych systemów placówek medycznych.



Micropoint qLabs® Q1 PL jest dla pacjentów i personelu medycznego

System został zaprojektowany dla pacjentów stosujących leki rozrzedzające krew w terapii przeciwzakrzepowej. Można na bieżąco, w wygodnych warunkach domowych monitorować krzepnięcie krwi wskaźnika PT i INR. Informacje z regularnych i częstych badań, przekazane lekarzowi prowadzącemu, pomagają w obserwacji postępów terapii, oraz, w razie konieczności, zmodyfikowaniu dawek przyjmowanych leków. Dysponowanie takim analizatorem krzepliwości krwi zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ w razie zauważenia niebezpiecznych zmian w parametrach krzepnięcia można szybko zastosować środki zaradcze, skontaktować się z lekarzem lub przekazać ważną informację diagnostyczną kiedy będzie potrzebna natychmiastowa interwencja medyczna.

W przypadku profesjonalnej opieki zdrowotnej, takiej jak przychodnie, gabinety lekarskie, punkty pierwszego kontaktu z pacjentem czy punktów diagnostyki medycznej, Micropoint qLabs® Q1 PL oferuje wyniki o jakości i dokładności porównywalnej z laboratoryjną, które można uzyskać w ciągu kilku minut. Lekarz, lub osoba z którą pacjent się konsultuje, może sprawdzić stopień krzepliwości krwi już w trakcie jednej wizyty. Kiedy dysponuje się wynikami PT i INR z ostatniej chwili, konsultacje z pacjentem przyjmującym leki zmieniające stopień krzepliwości krwi, mogą przynieść poprawę jakości terapii.

System do kontroli koagulacji umożliwia dostęp do bieżących wyników gęstości krwi, tak w placówce medycznej, jak i w domu czyniąc go doskonałym narzędziem dla pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Analizator Micropoint qLabs® Q1 PL jest lekki i przenośny, a paski testowe, będące istotnym elementem systemu, można przetrzymywać w temperaturze pokojowej. System można bezpiecznie trzymać pod ręką w domu lub wziąć ze sobą w podróż. W przypadku placówek medycznych, analizator można przenosić do różnych gabinetów, pokojów zabiegowych lub nosić ze sobą do różnych placówek.

Testy qLabs

Integralnym elementem systemu qLabs® są paski testowe INR. Indywidualne opakowania chronią paski testowe przed wilgocią oraz zmniejszają ryzyko zakażenia pacjentów. Paski testowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co dodatkowo zmniejsza koszty ich przechowywania. Paski testowe PT/INR są dostępne w opakowaniach po 12, 24 i 48 pasków.

Najważniejsze cechy systemu Micropoint qLabs® Q1 PL:

- Mała próbka krwi z opuszka palca, minimum 10 µL.
- Wbudowana kontrola jakości testu.
- Wynik PT/INR jest wyświetlany do 90 sek.
- Pamięć 200 wyników testów.
- Porty: Bluetooth, USB
- Przeciwoślizgowa obudowa.
- Możliwość zasilania sieciowego i baterijnego (4 xAA).

Oprogramowanie Data Manager

Do urządzenia dołączane jest oprogramowanie Data Manager, dzięki któremu można przysyłać wyniki do komputera poprzez kabel USB znajdujący się w zestawie. Oprogramowanie oraz sterowniki działają z najnowszymi wersjami systemu Windows.

Program umożliwia:

- zarządzanie wynikami,
- wydruk wyników badań,
- eksport do pliku CSV (możliwy do otworzenia w programie Excel),
- graficzne przedstawienie wyników za pomocą wykresu.

qLabs Data Manager V2.0.20b

Wysyłanie wyniku Wysyłanie wyników Przegląd wyników Wykres pacjenta

PT
2019
QC_Record
RACE
VET

Warunki wyszukiwania

☐ Data/Czas Od 16.11.2020 Do 16.11.2020

☐ ID Pacjenta

☐ Operator

☐ Numer Seryjny

☐ Platforma PT

Szukaj

Wynik


Indeks	Platf...	Obie...	ID Pacj...	Operator	Wynik
23/05/2019.024-v...	PT	PT-QC	TEST		INR=1.92
23/05/2019.024-v...	PT	PT-QC	123		INR=1.92
21/05/2019.023-v...	PT	PT-QC	TEST		INR=2.76
21/05/2019.023-v...	PT	PT-QC	123		INR=2.76

Poprz. Nast. Usuń Raport Przegląd Eksport

MICROPOINT

Ustawienia Bluetooth

Port COM: Zamknięty Micropoint Biotechnologies, Co., Ltd.

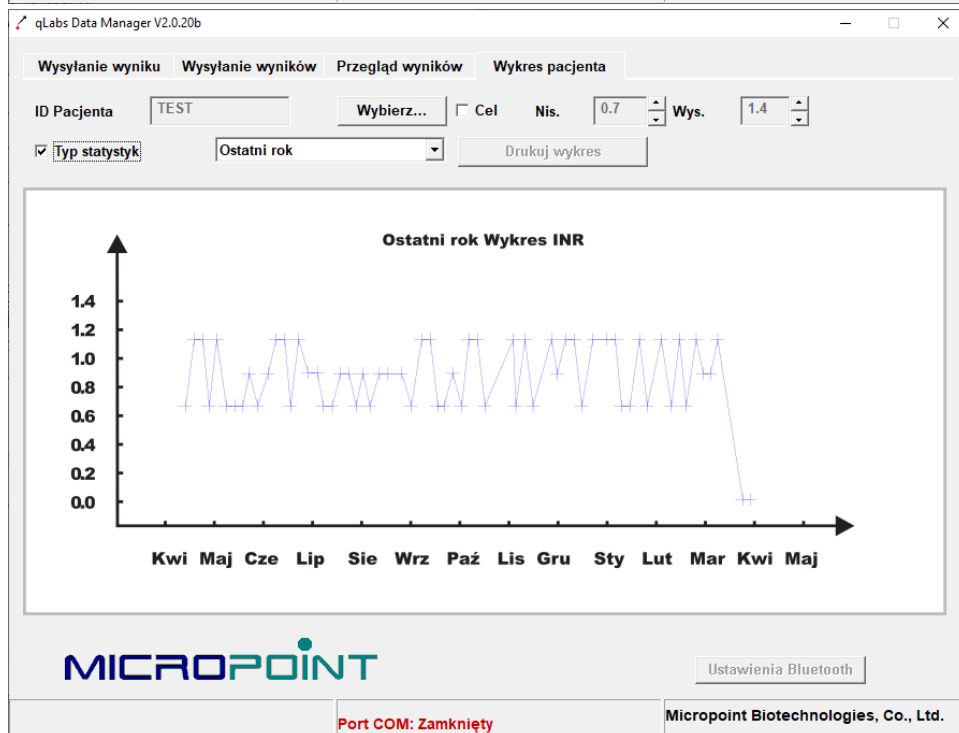

Znak

CE 0123



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs® firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w

zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

OGRANICZENIA

- System qLabs® przeznaczony jest do użycia ze świeżą pełną krwią kapilarną. Nie należy używać świeżej krwi żyłnej ani krwi pobranej na antykoagulant
- System qLabs® nie podlega wpływowi heparyny w stężeniach do 1 anti-Xa na mL krwi. Dotyczy to heparyny zarówno niefrakcjonowanej, jak i niskomolekularnej.
- Kropla krwi musi mieć objętość co najmniej 10 µl lub musi to być duża wisząca kropla krwi. Mała objętość próbki spowoduje wyświetlenie się komunikatu o błędzie.
- W badaniach in vitro nie wykazano istotnego wpływu w próbkach zawierających bilirubinę w stężeniu do 20mg/dl oraz hemoglobinę w stężeniu 500 mg/dl (hemoliza). Nie stwierdzono istotnego wpływu w przypadku próbek zawierających trójglicerydy w stężeniu do 1500mg/dl (lipemia).
- Paski testowe qLabs® PT-INR działają skutecznie w temperaturze w zakresie 10-35°C oraz w 10-90% RH (wilgotność względna). Dotyczy to oddziaływania powyższych warunków na pasek przez 10 minut po wyjęciu z opakowania.

W opakowaniu z urządzeniem Micropoint qLabs® Q1 PL są:

- Zasilacz 240V na 7V z wtyczką: Typ B (stosowane w UE, razem z Polską)
- Przewód USB do komunikacji z komputerem oraz oprogramowanie w j. polskim.
- Pamięć USB (pendrive) z filmem instruktażowym
- Instrukcja użytkownika PL, EN, ...
- Saszetka do bezpiecznego przenoszenia
- 10 Jednorazowych Sterylnych Bezpiecznych Nakłuwaczy 2,4 mm 21G lub 1,8 mm 21G do badania INR
- Poradnik szybkiego startu po Polsku





Każdy zestaw posiada wydrukowaną instrukcję obsługi w języku polskim w formacie A6, instrukcja obsługi została zatwierdzona przez producenta. Jakość tłumaczenia tej instrukcji w znacznym stopniu ułatwia obsługę systemu qLabs.

Gwarancja:


- 3 lata

Szkolenie

- Chorzów

Termin i miejsce szkolenia, do ustalenia po dokonaniu płatności. Ustalony termin musi znajdować się w okresie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia dokonania zapłaty za szkolenie.

GRATIS!

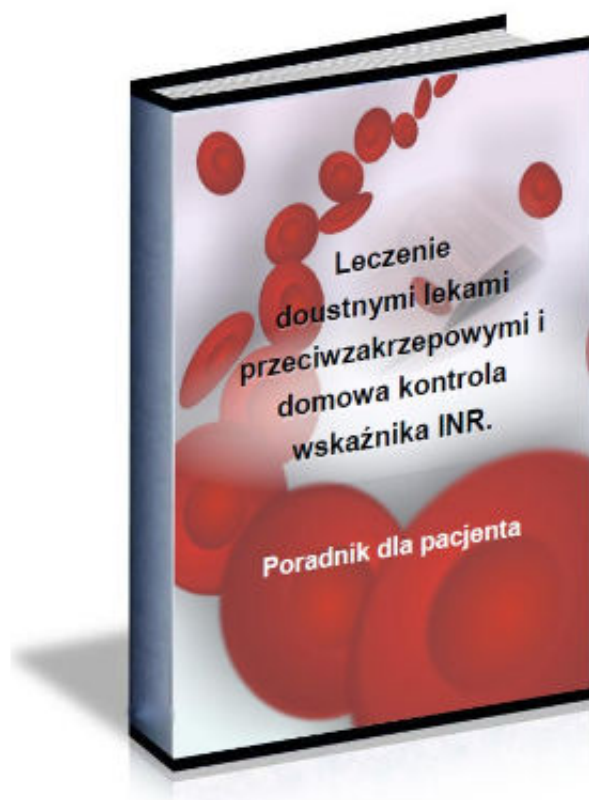

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**



W przypadku zastosowań w jednostkach szpitalnych zastosowanie znajdzie inny model [qLabs® Plus model Q3 plus](#), który ma możliwość dodatkowo drukowania wyników, skanowania kodów pacjenta, oraz możliwość pomiaru INR, PT, aPTT.

inratio2 inratio

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nakłuwacze INR: ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G, 1.8mm 10 szt. [HTL7006-10] PROMO (+ 0,27 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com