

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-q1-pl-obowiazkowy-zestaw-z-432-paskami-do-pt-inr-platny-wg-ceny-dodatkowej-q-1-dla-poradni-kardiologicznej-lub-szpitala-p-1580.html>



qLabs Q1 PL obowiązkowy zestaw z 432 paskami do PT INR płatny wg. ceny dodatkowej q-1 dla poradni kardiologicznej lub szpitala

Cena	1,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MBQ1-PL
Kod producenta	Q1-PL-360T
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	21-07-2025
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Zestaw Micropoint qLabs® Q1 PL z 432 paskami PT - INR przeznaczony do samokontroli, oraz może być używany przez lekarzy w szpitalach.

Szybkie i precyzyjne określanie czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenie wskaźnika INR z krwi pełnej z żyły lub krwi włośniczkowej. Zaawansowany system monitorowania krzepliwości krwi.

System Micropoint qLabs® Q1 PL umożliwia dostęp do wyników o jakości laboratoryjnej na miejscu, przy pacjencie. Jest wygodny w obsłudze i tani w utrzymaniu oraz konserwacji, składa się z przenośnego analizatora do pomiaru INR oraz jednorazowych, indywidualnie pakowanych pasków testowych.

Jednorazowe paski testowe Micropoint qLabs® służą ochronie urządzenia i badanej próbki przed zanieczyszczeniem. Analizator nie wymaga czyszczenia po każdym badaniu, można wykonywać seryjne testy INR.

- Test PT/INR z jedynie 10 µL próbki krwi żyłnej, lub nakłucia opuszka palca.
- Wynik PT i INR jest wyświetlany po kolejnych 2 minutach od podania próbki.
- Wbudowana kontrola jakości (QC) daje pewność jakości wyników, minimalizuje ryzyko nieprawidłowego pomiaru.
- Własna pamięć w której może przechowywać aż do 200 ostatnich wyników badań.

Aparat Micropoint qLabs® Q1 PL jest przenośnym urządzeniem z możliwością zasilania tak przewodowego, jak i bateryjnego. Dzięki czemu można z niego korzystać w każdym miejscu, nawet poza zasięgiem gniazdka elektrycznego.

Jest na tyle mały, że mieści się w dłoni, dlatego zastosowano antypoślizgową niebieską gumową opaskę na obrzeżach urządzenia.

Funkcja Bluetooth do bezprzewodowego transferu danych oraz dodatkowe porty USB i microUSB aby można było bez problemu skomunikować system z komputerami. Dzięki temu można zapisać wyniki dla wewnętrznych informatycznych systemów placówek medycznych.

Jako standard qLabs® Q1 PL jest objęty roczną gwarancją.



Micropoint qLabs® Q1 PL służby zdrowia

System został stworzony z myślą o pacjentach stosujących leki rozrzedzające krew w terapii przeciwzakrzepowej. Informacje z regularnych i częstych badań, przekazane lekarzowi prowadzącemu, pomagają w obserwacji postępów terapii, oraz, w razie konieczności, zmodyfikowaniu dawek przyjmowanych leków. Dysponowanie takim analizatorem krzepliwości krwi zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ w razie zauważenia niebezpiecznych zmian w parametrach krzepnięcia można szybko zastosować środki zaradcze, skontaktować się z lekarzem lub przekazać ważną informację diagnostyczną kiedy będzie potrzebna natychmiastowa interwencja medyczna.

Dla profesjonalnej opieki zdrowotnej, takiej jak przychodnie, gabinety lekarskie, punkty pierwszego kontaktu z pacjentem czy punktów diagnostyki medycznej, Micropoint qLabs® Q1 PL oferuje wyniki o jakości porównywalnej z laboratoryjną, które można uzyskać w ciągu kilku minut. Lekarz, lub osoba z którą pacjent się konsultuje, może sprawdzić stopień krzepliwości krwi już w trakcie jednej wizyty. Kiedy dysponuje się wynikami PT i INR z ostatniej chwili, konsultacje z pacjentem przyjmującym leki zmieniające stopień krzepliwości krwi, mogą przynieść poprawę jakości terapii.

System do kontroli koagulacji umożliwia dostęp do bieżących wyników gęstości krwi, tak w placówce medycznej, jak i w domu

czyniąc go doskonałym narzędziem dla pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Testy qLabs



Integralnym elementem systemu qLabs® są paski testowe INR. Indywidualne opakowania chronią paski testowe przed wilgocią oraz zmniejszają ryzyko zakażenia pacjentów. Paski testowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co dodatkowo zmniejsza koszty ich przechowywania.

Cechy paska testowego qLabs® PT-INR

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbkę: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s

Najważniejsze cechy systemu Micropoint qLabs® Q1 PL:

- Mała próbka krwi z opuszka palca, minimum 10 µL.
- Wbudowana kontrola jakości testu.
- Czas przeprowadzenia badania 1 - 5 minut.
- Wynik PT/INR jest wyświetlany w 2 minuty.
- Pamięć 200 wyników testów.
- Porty: Bluetooth, USB i microUSB
- Przeciwpółlżgowa obudowa.
- Możliwość zasilania sieciowego i baterijnego (4 xAA).
- **Model qLabs® Q1 PL, w porównaniu do starszych wersji zawiera:**
 - **najnowsze oprogramowanie firmware które zawiera język polski w menu**
 - **10-krotnie większą dokładność, poprzez zwiększenie ilości wyświetlanych liczb po przecinku dla wartości INR**
 - **Dodatkowe opcje w menu**


- 2 lata standardowej gwarancji

Oprogramowanie Data Manager

Do urządzenia dołączane jest oprogramowanie Data Manager, dzięki któremu można przysyłać wyniki do komputera poprzez kabel USB znajdujący się w zestawie. Oprogramowanie oraz sterowniki działają z najnowszymi wersjami systemu Windows.

Program umożliwia:

- zarządzanie wynikami,
- wydruk wyników badań,
- eksport do pliku CSV (możliwy do otworzenia w programie Excel),
- graficzne przedstawienie wyników za pomocą wykresu.

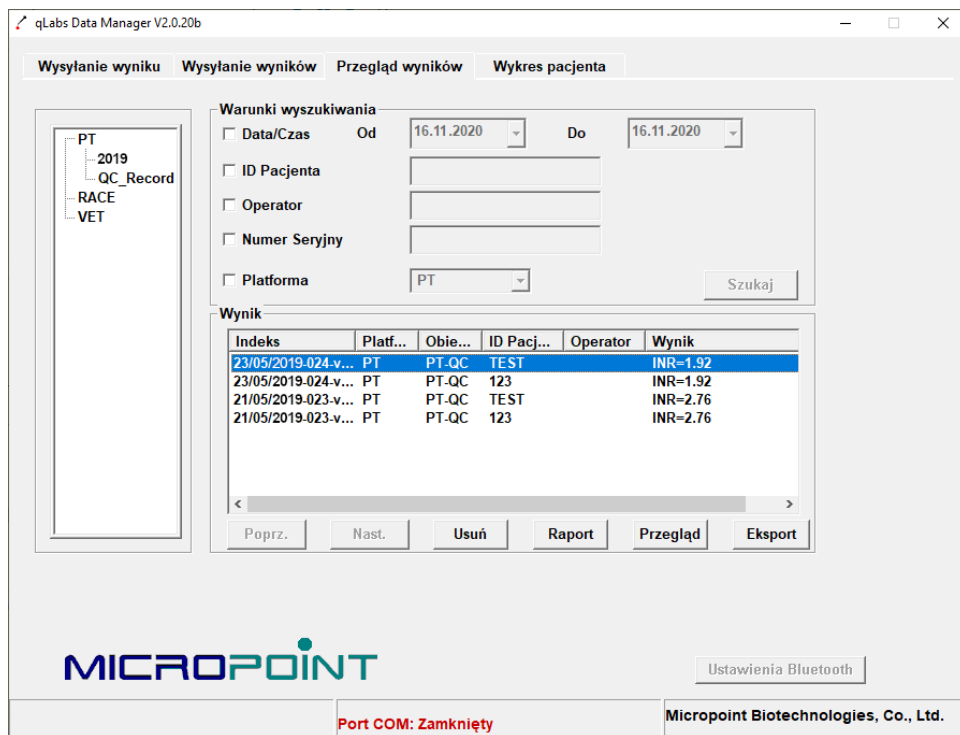

qLabs Data Manager V2.0.20b

Wysyłanie wyniku Wysyłanie wyników Przegląd wyników Wykres pacjenta

PT
2019
QC_Record
RACE
VET

Warunki wyszukiwania

☐ Data/Czas Od: 16.11.2020 Do: 16.11.2020

☐ ID Pacjenta

☐ Operator

☐ Numer Seryjny

☐ Platforma: PT Szukaj

Wynik


Indeks	Platf...	Obie...	ID Pacj...	Operator	Wynik
23/05/2019.024-v...	PT	PT-QC	TEST		INR=1.92
23/05/2019.024-v...	PT	PT-QC	123		INR=1.92
21/05/2019.023-v...	PT	PT-QC	TEST		INR=2.76
21/05/2019.023-v...	PT	PT-QC	123		INR=2.76

Poprz. Nast. Usuń Raport Przegląd Eksport

MICROPOINT

Ustawienia Bluetooth

Port COM: Zamknięty Micropoint Biotechnologies, Co., Ltd.

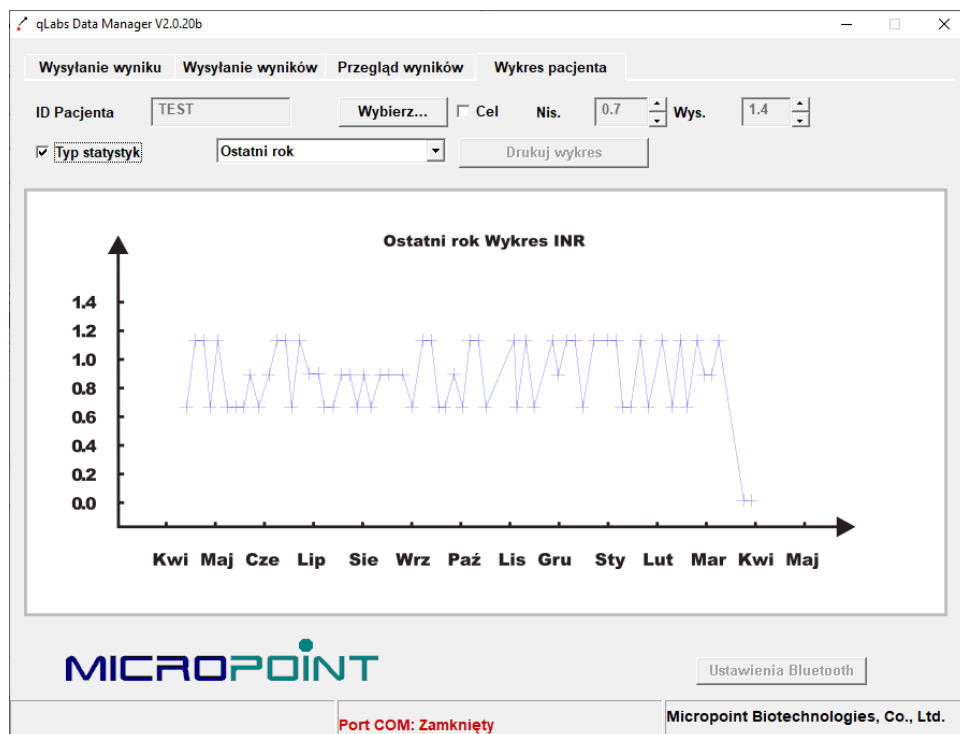

Znak

CE 0123



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs® firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

OGRANICZENIA

- System qLabs® przeznaczony jest do użycia ze świeżą pełną krwią kapilarną. Nie należy używać świeżej krwi żyłnej ani krwi pobranej na antykoagulant.
- System qLabs® nie podlega wpływowi heparyny w stężeniach do 1 anti-Xa na mL krwi. Dotyczy to heparyny zarówno niefrakcjonowanej, jak i niskomolekularnej.
- Kropla krwi musi mieć objętość co najmniej 10 µl lub musi to być duża wisząca kropla krwi. Mała objętość próbki spowoduje wyświetlenie się komunikatu o błędzie.
- W badaniach in vitro nie wykazano istotnego wpływu w próbkach zawierających bilirubinę w stężeniu do 20 mg/dl oraz hemoglobinę w stężeniu 500 mg/dl (hemoliza). Nie stwierdzono istotnego wpływu w przypadku próbek zawierających trójglicerydy w stężeniu do 1500 mg/dl (lipemia).
- Paski testowe qLabs® PT-INR działają skutecznie w temperaturze w zakresie 10-35°C oraz w 10-90% RH (wilgotność względna). Dotyczy to oddziaływania powyższych warunków na pasek przez 10 minut po wyjęciu z opakowania.

W opakowaniu z urządzeniem Micropoint qLabs® Q1 PL są:

- Zasilacz z 240V na 7V z wtyczką: Typ B (stosowane w UE, razem z Polską)
- 432 pasków testowych qLabs® PT-INR (36x op. 12 szt.) paski pakowane indywidualnie.**
- Przewód USB do komunikacji z komputerem
- Instrukcja użytkownika

- Pamięć USB (pendrive) z filmem instruktażowym
- Saszetka do bezpiecznego przenoszenia
- 10 Jednorazowych Sterylnych Bezpiecznych Nakłuwaczy 2,4 mm 21G lub 1,8 mm 21G do badania INR
- Poradnik szybkiego startu po Polsku



Każdy zestaw posiada wydrukowaną instrukcję obsługi w języku polskim w formacie A6, instrukcja obsługi została zatwierdzona przez producenta. Jakość tłumaczenia tej instrukcji w znacznym stopniu ułatwia obsługę systemu qLabs®.

Gwarancja:


- Standard 2 lata
- Opcja 3 lata
- Opcja **Premium** - Opcjonalne 4 lat razem z gwarancją wymiany na inny w przypadku braku dostępności pasków testowych lub zaprzestania produkcji w okresie gwarancji.

Szkolenie

- Chorzów

Termin i miejsce szkolenia, do ustalenia po dokonaniu płatności. Ustalony termin musi znajdować się w okresie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia dokonania zapłaty za szkolenie.

GRATIS!

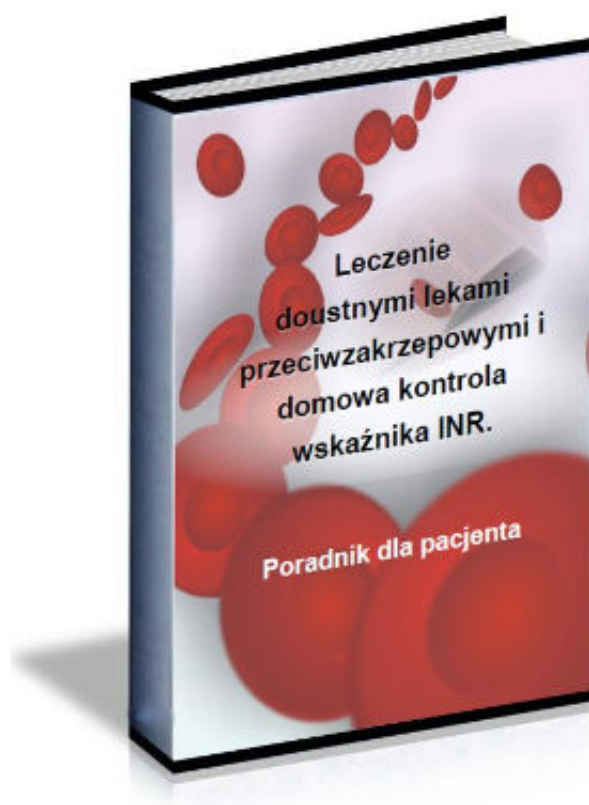

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

W sprzedaży dla jednostek medycznych dostępny jest także model [qLabs® Plus model Q-2](#), który ma możliwość dodatkowo drukowania wyników, skanowania kodów pacjenta i operatora, oraz możliwość pomiaru INR, PT, aPTT a także fibrynogenu²(fib) oraz czasu trombinowego³ (TT)

²- Produkt dostępny od IV kw 2020 na zamówienie.

³- Produkt dostępny na zamówienie od 2021.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paski testowe: 432 (+ 6 172,20 zł)

Szkolenie z obsługi qLabs: Brak , Telefonicznie (+ 350,00 zł)

Gwarancja: standard 2 lata , opcja 3 lata (+ 421,20 zł), opcja 4 lata Premium (+ 529,20 zł)



Producent

Strona producenta www.monitorNR.com