

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-test-pt-inr-48-szt-do-analizatora-qlabs-kontrola-krzepliwosci-krwi-p-811.html>

## qLabs Test PT-INR - 48 szt - do analizatora qLabs - kontrola krzepliwości krwi

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Cena                   | <b>685,80 zł</b>                            |
| Dostępność             | <b>Dostępny</b>                             |
| Czas wysyłki           | <b>dzień roboczy do 13:00</b>               |
| Numer katalogowy       | <b>MPQS-1-24 x2</b>                         |
| Kod producenta         | <b>QS-1-48</b>                              |
| Producent              | <b>.Micropoint Biotechnologies Co.,</b>     |
| Data ważności testów:  | <b>29-07-2025</b>                           |
| Producent              | <b>Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.</b> |
| Podmiot Odpowiedzialny | <b>Obelis S.A.</b>                          |

### Opis produktu


#### **UWAGA !!!**

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Jednorazowe paski testowe do pomiaru krzepliwości krwi dla analizatora qLabs® Q1 oraz qLabs Q3. Paski testowe przeznaczone są dla pacjenta do samodzielnej kontroli gęstości krwi. Wyniki podawane są jako PT i INR w zależności od ustawienia paratu..

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego. Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku.

Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi wystarczy próbka krwi pełnej wielkości 10 µL z opuszka palca lub żyły. Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do qLabs® Q-1 pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

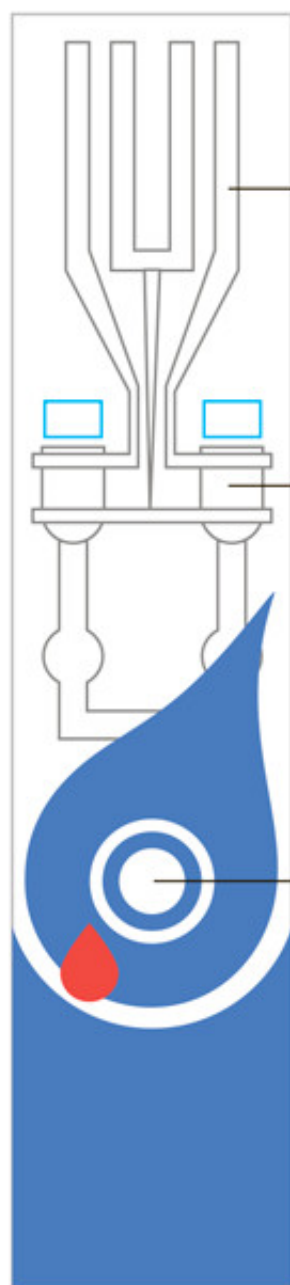

3 Strefa reakcyjna zawiera dwie metalowe elektrody, na których stosuje się stałe napięcie.

2 W strefie reakcyjnej, krew miesza się z odczynnikami aktywującymi krzepnięcie.

1 Kropla krwi, naniesiona na pasek testowy, doprowadza jest kanałami kapilarnymi do strefy reakcyjnej.

Micropoint qLabs® Q1 to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. qLabs® Q-1 oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Cechy paska testowego qLabs® Q-1

- Zakres pomiarowy: INR pomiędzy 0,5 - 7,5
- Próbkę: 10 µL Świeża krew z palca.

**Zestaw zawiera:**


- dwa opakowania po 24 paski czyli 48 testów do badania PT/INR które można używać z aparatem qLabs Q1 oraz qLabs Q3
- Polska instrukcja obsługi w każdym opakowaniu
- kostka kalibrująca do użycia z aparatem qLabs Q3 w każdym opakowaniu.

**Każdy pasek testowy zawiera:**

- Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.  
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

**GRATIS!**

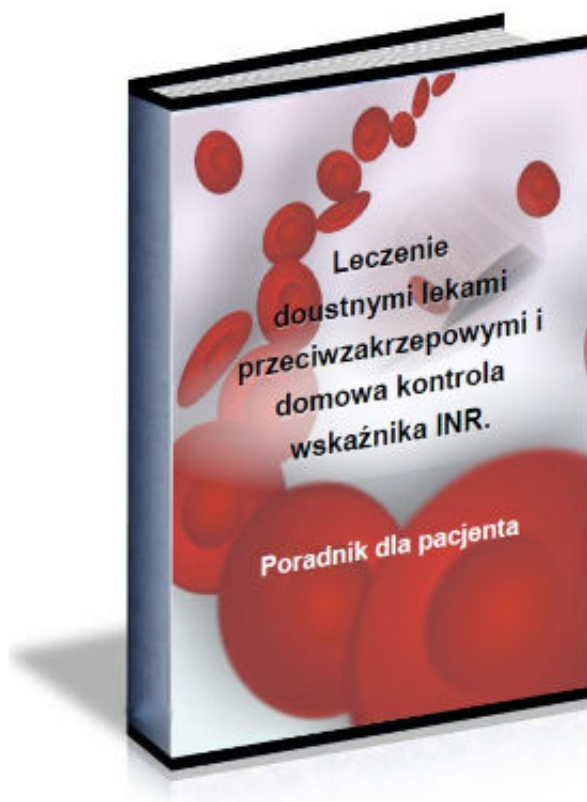

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Nakłuwacze INR:** ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G, 1.8mm 10 szt. [HTL7006-10] PROMO (+ 0,27 zł )

**Producent**



---

Strona producenta [www.monitorINR.com](http://www.monitorINR.com)