

Link do produktu: <https://redmed.pl/rajstopy-profilaktyczne-p-185.html>



Rajstopy profilaktyczne

Cena	25,99 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	rajstopy profilaktyczne
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Rajstopy profilaktyczne Avicenum 70 wspomagają i poprawiają krążenie krwi. Działają zapobiegawczo przeciwko powstawaniu żylaków i cellulitu. AVICENUM 70 zapobiega okresowym obrzękom nóg, np. podczas dłuższego stania lub siedzenia oraz przy większym obciążeniu nóg. Szczególnie polecane dla osób z dziedzicznymi skłonnościami do powstawania żylaków.

Ucisk w okolicach kostki: 10 - 14 mmHg



Skład: 76 % Nylon, 24 % Lycra



Zawiera apreturę antybakteryjną i przeciwwgrzybiczą Sanitized Silver, która zawiera aktywne jony srebra, przez co zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów (pleśni i bakterii); Jony te przenikają przez ścianę komórkową mikroorganizmów i ograniczają dostęp tlenu i substancji odżywczych. W ten sposób skutecznie zapobiegają ich rozmnażaniu się oraz powstawaniu kolonii, które są często odporne na zwykły cykl prania. Produkty nie zawierają nanosrebra. Zwiększa higieniczność i trwałość wyrobu. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i uprzyjemnia codzienne noszenie pończoch.

Dostępne rozmiary:

- 158-164/116-124,
- 164-170/116-124,
- 170-176/116-124,
- 170-176/124-132,
- 176-182/108-116,
- 176-182/116-124

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym

- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żylniej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żylniej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 8001 , 9999

Rozmiar: wybierz , 158-164/116-124 , 164-170/116-124 , 170-176/116-124 , 170-176/124-132 , 176-182/116-124