

Link do produktu: <https://redmed.pl/rajstopy-przeciwwylakowe-avicenum-140-den-p-177.html>

Rajstopy przeciwżylakowe Avicenum - 140 DEN

Cena	43,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rajstopy140
Kod EAN / GETIN	8590072200702
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Rajstopy przeciwżylakowe I klasy Avicenum 140 Aries. Stosowany nacisk klasyfikuje te rajstopy do I (pierwszej) klasy kompresyjnej. Podtrzymujące rajstopy Avicenum 140 mają wypróbowany spadek nacisku – w okolicy kostki ciśnienie wynosi 15-21 mmHg i w górę obniża się. Ograniczają uczucie zmęczenia, obrzęki, uczucie ciężkości i napięcia w nogach. Działają prewencyjnie w początkach niewydolności żylniej. Wyroby te posiadają wzmocnioną piętę.



Skład: 64 % Nylon, 36 % Lycra.



Rajstopy przeciwżylakowe I klasy mają mikrokapsułki Skintex® Anti-Heavy-Legs. W miesiącach letnich, kiedy nogi w wyniku wysokich temperatur bardziej puchną, świetnie sprawdza się chłodzące i orzeźwiające działanie mentolu. Oprócz tego mikrokapsułki stopniowo uwalniają ekstrakty z grapefruita, cytryny i tymianku.

Dostępne rozmiary:


- 2k
- 2d

Długość nogi w przypadku rajstop:

- do 70 cm = K (krótkie)
- od 70 cm = D (długie)

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Trzeba też precyzyjnie dobrać siłę ucisku, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

a - obwód stopy
b - obwód w kostce
b1 - obwód łydki
c - obwód pod kolanem
d - obwód nad kolanem
f - obwód uda
g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
t - obwód pasa

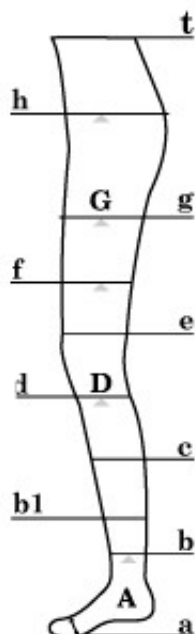

Obwód nogi	Rozmiary 1	Rozmiary 2	Rozmiary 3
t - obwód pasa	80	90	100
h - obwód bioder	110	120	130
g - obwód uda	50 - 55	55 - 60	60 - 66
f - obwód nad kolanem	46 - 50	50 - 54	54 - 58
d - obwód pod kolanem	34 - 37	37 - 40	40 - 44
b - obwód nad kostką	22 - 24	24 - 27	27 - 30

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym
- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żyłnej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żyłnej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych

- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 9999

Rozmiar: wybierz , 2k