

Link do produktu: <https://redmed.pl/syphilis-test-zanurzeniowy-kily-40-szt-p-441.html>

Syphilis - Test zanurzeniowy kiły - 40 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	201001
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki test immunologicznym do jakościowego stwierdzania przeciwciał (IgG i IgM) przeciw krętkowi blademu w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Krętek błądy (*Treponema Pallidum*, TP) jest zarazkiem powodujący chorobę narządów płciowych - kiłę (syphilis), przekazywany jest z człowieka na człowieka poprzez kontakty seksualne lub kontakt błony śluzowej z krwią.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne i nieracjonalne ich stosowania.

Krętek błądy (*T. pallidum*) jest, bakterią posiadającą błonę zewnętrzną i cytoplazmatyczną membranę i w porównaniu do innych bakterii patogennych stosunkowo niewiele o niej wiadomo. Według Centrum Kontroli Chorób (CDC), od 1985 roku liczba infekcji syfilisem znacznie wzrosła. Przyczyną tego wzrostu może być zwiększona konsumpcja kokainy crack w ostatnich latach oraz wysoki wskaźnik prostytucji wśród osób zażywających narkotyki. Podczas badań stwierdzono istotną korelację między zarażeniem i przekazywaniem wirusa HIV i kiły.

Charakterystyczne dla kiły są pewne etapy kliniczne rozwoju choroby i długie okresy utajonej, bezobjawowej infekcji. Początkowy etap infekcji objawia się wystąpieniem owrzodzenia. Reakcje przeciwciał przeciwko *T. pallidum* mogą być wykryte po 4-7 dniach od pojawienia się owrzodzenia. Infekcja jest możliwa do wykrycia do momentu rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Test Syphilis opiera się na kombinacji cząsteczek pokrytych przeciwciałami syfilisu oraz unieruchomionych antygenów syfilisa w celu jakościowego i selektywnego wykrycia przeciwciał *T. pallidum* we krwi, surowicy lub osoczu.

Zasada działania testu

Test NADAL® Syphilis jest jakościowym, membranowym, immunologicznym testem do stwierdzania przeciwciał *T. pallidum* (IgG i IgM) w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza. W teście tym na linii testowej znajduje się rekombinowany antygen syfilisu. Po dodaniu próbki do otworu na kasiecie dochodzi do reakcji pomiędzy próbka a cząsteczkami pokrytymi antygenem kiły. Mieszanina przesuwana się chromatograficznie wzdłuż testu i reaguje z powiązanymi antygenami kiły. Podwójny test antygenowy może wykryć zarówno przeciwciała IgM jak i IgG w próbce. Jeżeli próbka zawiera przeciwciała *T. pallidum*, pojawia się kolorowa linia w polu testowym (T), co oznacza wynik pozytywny. Jeżeli próbka nie zawiera przeciwciał *T. pallidum*, kolorowa linia się nie ukazuje, co oznacza negatywny wynik testu. Czerwona linia powinna pojawić się zawsze w polu kontrolnym (C). Linia kontrolna jest kontrolą wewnętrzną testu i służy jako potwierdzenie dodania odpowiedniej ilości próbki oraz odpowiedniego nasiąknięcia membrany.

Części składowe zestawu

- 40 pasków testowych. Pasek testowy zawiera część pokrytą antygenem syphilis oraz membranę pokrytą syfilisem)
- 40 kart testowych pacjentów
- 40 jednorazowych pipetek
- 2 buteleczki z buforem
- 1 instrukcja obsługi

Próbka: Krew pełna, osocze, surowica



Czas testu: 10-30 minut

Czułość: 99,7%

Swoistość: 99,6%

Przechowywanie: schłodzony do temp. 2-8°C albo w temp. pokojowej (nigdy pow. 30°C)