

Link do produktu: <https://redmed.pl/szybki-test-sars-cov-2-rapid-antigen-test-roche-25-szt-wymaz-nosowo-gardlowy-refundacja-nfz-p-1657.html>



Szybki test SARS-CoV-2, Rapid Antigen Test Roche - 25 szt - wymaz nosowo-gardłowy, refundacja NFZ

Cena	535,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	ROCH9901-NCOV-01G
Kod producenta	9901-NCOV-01G
Producent	Roche

Opis produktu

1604 SARS-COV-2 Rapid Antigen Test (Roche (SD BIOSENSOR))

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test firmy Roche jest szybkim testem chromatograficznym przeznaczonym do jakościowego wykrywania swoistych antygenów SARS-CoV-2 obecnych w próbkach pochodzących z jamy nosowo-gardłowej lub połączonych, pochodzących z jamy nosowo-gardłowej/ustno-gardłowej. Test przeznaczony jest do wykrywania antygenów wirusa SARS-CoV-2 u osób podejrzanych o zakażenie COVID-19.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Testy Zgodne z Zarządzeniem 187/2020/DSOZ z dn. 25.11.2020 Prezesa NFZ do celów refundacji.

Informacja o refundacji NFZ:

w ramach portalu <https://gabinet.gov.pl> należy wybrać:

1604 SARS-COV-2 Rapid Antigen Test (Roche (SD BIOSENSOR))

Opakowanie zawiera 25 zestawów gotowych do użycia testów oraz instrukcję obsługi i skróconą instrukcję obsługi.

Koronawirusy mogą powodować różne ostre i przewlekłe stany chorobowe. Typowe objawy zakażenia koronawirusem to objawy ze strony układu oddechowego, gorączka, kaszel, skrócenie oddechu i duszność. W cięższych przypadkach zakażenie może prowadzić do zapalenia płuc, ciężkiego ostrego zespołu oddechowego, niewydolności nerek, a nawet śmierci. Nowy koronawirus 2019 lub inaczej SARS-CoV-2, odkryty został w 2019 roku, w związku z powiązanymi przypadkami wirusowego zapalenia płuc, a już 11 marca 2020 r Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. WHO potwierdziło, że COVID-19 może powodować przebiegienia i poważniejsze choroby, takie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS).

W SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test metoda jest ukierunkowana jest na wykrywanie białka nukleokapsydu. Posiada dwie wstępnie powlekane linie: Linie kontrolną 'C' oraz linię testu 'T' na powierzchni nitrocelulozowej błony. Zarówno linia kontrolna jak i linia testu w oknie wyników przed naniesieniem próbek nie są widoczne. Linia testu opłaszczona została mysimi monoklonalnymi przeciwciałami anti-SARS-CoV-2 a linia kontrolna opłaszczona została mysimi monoklonalnymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko kurzym IgY. Mysie przeciwciała monoklonalne anti-SARS-CoV-2 skoniugowane z cząstkami barwnika służą jako detektory w urządzeniu testowym wykrywającym antygeny SARS-CoV-2. W trakcie testu, zawarte w próbce antygeny SARS-CoV-2 reagują z monoklonalnymi przeciwciałami anti-SARS-CoV-2 skoniugowanymi z



cząstkami barwnika tworząc barwny kompleks antygen-przeciwciało. Kompleks ten migruje na błonie na zasadzie działania kapilarnego aż do linii testu, gdzie jest wychwytywany przez monoklonalne mysie przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Jeśli w próbce obecne są antygeny SARS-CoV-2, w oknie wyników widoczna będzie barwna linia testu. Intensywność barwnej linii testu różni się w zależności od ilości obecnych w próbce antygenów SARS-CoV-2.

Rodzaj testu: Jakościowy

Rodzaj próbki: jamy nosowo-gardłowej, lub połączonych z jamy nosowo-gardłowej/ustno-gardłowej

Czas uzyskania wyniku: 15 minut (Okno odczytu 15-30 minut)

Temperatura przechowywania: 2-30°C

Potwierdzone wykrywanie mutacji SARS-Cov-2: Omikron

Kontrole dodatnie i ujemne są elementami opcjonalnymi i można je zamówić oddzielnie

Kto może zakupić testy.

Zakupu może dokonać podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w tym zakłady opieki zdrowotnej; osoby fizyczne