

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-1-szt-do-inratio-i-inratio2-pasek-testowy-do-kontroli-wskaznika-inr-p-139.html>



Test 1 szt. do INRatio i INRatio2, Pasek testowy do kontroli wskaźnika INR

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Numer katalogowy	0100071_1
Kod producenta	Pasek do inratio2
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Dodatkowa informacja	Ważna informacja Bezpieczeństwa, testy Alere INRatio2

Opis produktu



Produkt analizator i paski INRatio2 wycofane w 2016r z produkcji.

[Kup Zamiennik marki qLabs - monitor do badania INR >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>](#)

Testy paskowe działają wyłącznie z urządzeniem INRatio lub INRatio2. Testy pozwalają w sposób ilościowy określić poziom wskaźnika INR we krwi pobranej z palca. Niewielka kropla krwi 15 µL pozwala na przeprowadzenie badania w sposób szybki i dokładny. W przeciwieństwie do innych testów paskowych firm konkurencyjnych paski możemy używać do końca daty ważności. Brak konieczności zużycia pasków w krótkim terminie po otwarciu opakowania.

Parametry techniczne:

- Zakres pomiarowy testów to:
 - INR: 0.7 - 7.5
 - 2. PT: 7 -75 sec.
- Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.
- Czas badania:
- Podwójny, niezależny system kontroli jakości badania na każdym pasku

Opcje dodatkowe:

- Pipety o pojemności 15μL lub 20μL, które samoistnie zasysają krew, pipety te są pokryte od wewnątrz heparyną co dodatkowo zwiększa dokładność przeprowadzonego badania.

Zawartość opakowania:

- dowolna ilość zamówionych sztuk pasków testowych do określenia poziomu INR we krwi
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim

Zastosowanie:

Paski do pomiaru wskaźnika INR to doskonałe rozwiązanie dla osób, które zmuszone są kontrolować swój INR. Trombofilia, zakrzepica żył głębokich, operacje zastawek czy przeszczepy serca to okoliczności, które zmuszały pacjentów do długich, regularnych i nieprzyjemnych wizyt w laboratorium, celem zbadania INR. Dzięki testom na krzepliwość krwi badanie staje się szybkie, wygodne i bezbolesne. Pomiar odbywa się z krwi kapilarnej więc żyły nie są narażone na ciągłe pobieranie krwi. Ponadto każdy pasek pakowany jest oddzielnie, dzięki czemu paski nie ulegną uszkodzeniu gdy opakowanie nie będzie szczelnie zamknięte. Można zawsze mieć je ze sobą i wykonywać pomiary wtedy kiedy jest to potrzebne.

Kto i kiedy powinien wykonać pomiar krzepliwości krwi.

- po zabiegach operacyjnych,
- po złamaniach nóg, miednicy,
- leżących z powodu ciężkich chorób,
- po przebytym zapaleniu i zakrzepicy żył głębokich nogi,
- u kobiet ciężarnych i po porodzie,
- u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą,
- u otyłych kobiet z masywnymi żylakami,
- z chorobą nowotworową.

Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (**I**nternational**N**ormalized **R**atio) - wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników niezależnie od użytych odczynników.

Wartości prawidłowe wskaźnika INR:

- u osób nieleczonych: 0,9-1,3
- u osób leczonych: 2-4

Czas protrombinowy PT/INR:

- norma - wskaźnik protrombinowy 80-120%; INR 0,9-1,3
- coś nie tak - podwyższenie poziomu wskaźnika
- co to oznacza - niedobór witaminy K, choroby wątroby, przyjmowanie leków antykoagulacyjnych

Wartości Prawidłowe dla PT/INR:

- 13 - 17 sek.- PT
- 0,9-1,3 - INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
- 80%-120% - wskaźnik Quicka

Co może oznaczać wydłużenie czasu protrombinowego?:

- przewlekłe choroby miększu wątroby
- niedobory witaminy K
- doustne środki antykoagulacyjne
- DIC- Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
- znaczne niedobory fibrynogenu
- dysfibrynogenemie
- białaczka
- mocznica
- choroba Addisona-Biermera
- niesteroidowe leki przeciwzapalne

Co może oznaczać skrócenie czasu protrombinowego?:


- zakrzepica
- trombofilia
- zwiększona aktywność czynnika VII

- okres okołoporodowy

Wskaźnik Quicka, wskaźnik protrombinowy:

Wskaźnik podający czas, po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie. Jest to stosunek czasu protrombinowego prawidłowego do czasu protrombinowego określonego w badanym przypadku. Norma: 70-100%

Brak konieczności zużycia pasków w krótkim terminie po otwarciu opakowania.

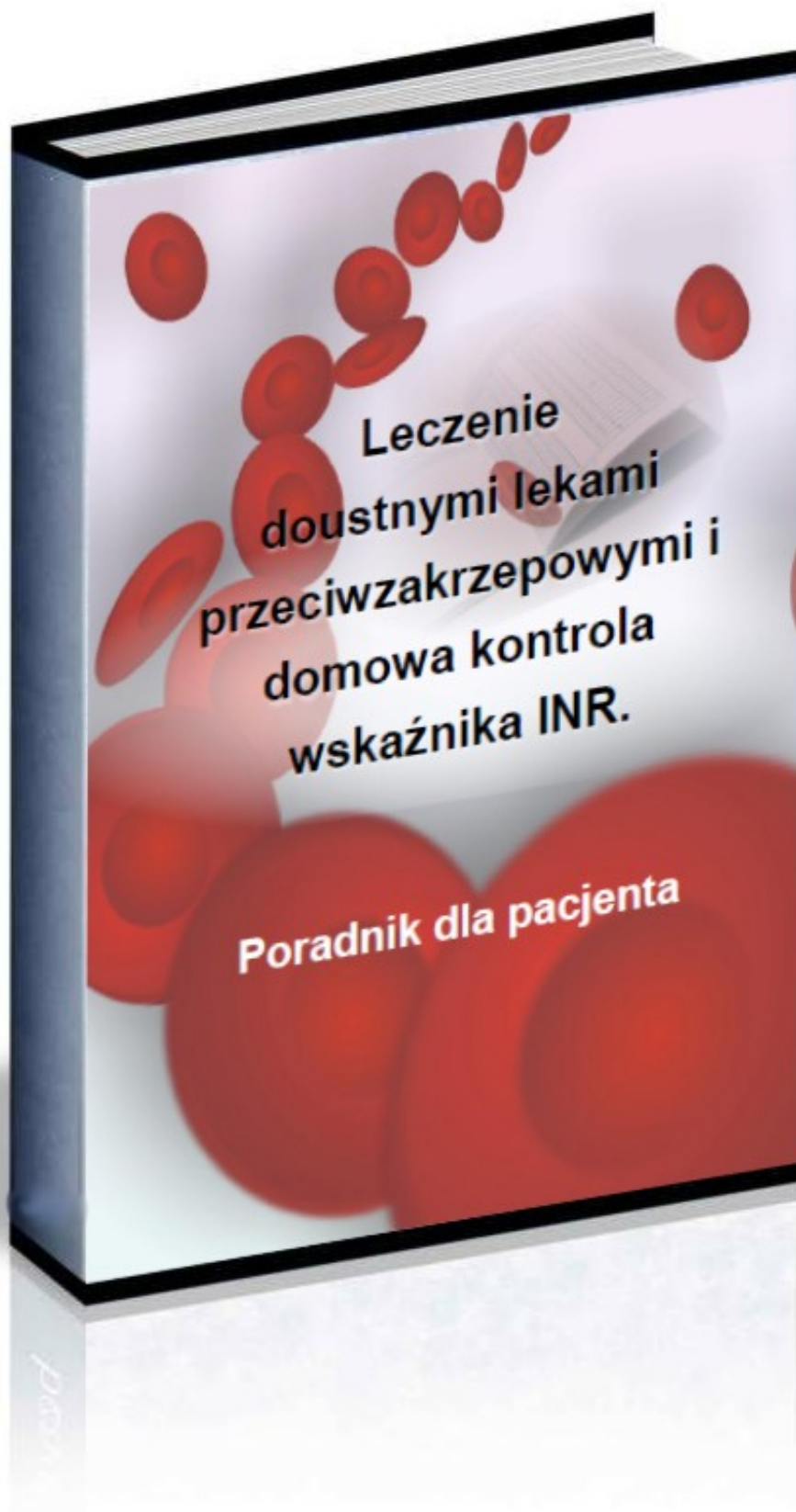

można dodatkowo zamówić [Poradnik dla pacjenta dotyczący leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz samokontroli PT/INR](#) GRATIS!

Notatka bezpieczeństwa firmy Alere San Diego, Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania monitorów i pasków testowych PT/INR Alere INRatio/INRatio 2 do pomiaru czasu protrombinowego.

 [FSN_Alere San Diego_16.09.2016_dla pacjentów.pdf](#)
 [FSN_Alere San Diego_16.09.2016_dla personelu.pdf](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Darmowy Poradnik INR: Nie , Drukowany

Pipety 15ul./25szt.: nie

Pipety 20μL/25szt.: nie , 1op. , 2op.