

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-zanurzeniowy-na-grype-influenza-ab-plus-10-szt-paskow-testowych-p-1279.html>



Test zanurzeniowy na grypę - Influenza A/B Plus, 10 szt. pasków testowych

Czas wysyłki

Zadzwoń 32 720 62 10

Numer katalogowy

241014N-10

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki, immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B (nukloprotein), które zostały wyekstrahowane z wymazów z nosa/nosogardzieli i popłuczyn/aspiratów z nosa pacjentów z objawami infekcji. Test służy, jako środek pomocniczy przy szybkiej diagnozie dyferencyjnej wirusa Influenza A i B.

Test ten nie jest przeznaczony do oznaczania antygenów wirusa Influenza C. Negatywne wyniki nie wykluczają infekcji wirusowej Influenza A lub B i powinny być potwierdzane kulturami komórkowymi przy pomocy testu biologii molekularnej. Test przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Test Influenza A/B plus umożliwia oznaczanie antygenów wirusa Grypy Typu A i B przez wizualną interpretację rozwoju kolorów na pasku testowym. Antyprzeciwciała Typu A i Typu B przeciwko antygenom nukleoproteinowym, unieruchomione są w poszczególnym obszarze linii testowej na membranie. Podczas badania, wyekstrahowane antygeny wiążą się z kolejnymi przeciwciałami przeciw Influenza Typu A i B, które skoniugowane są z kolorowymi cząsteczkami i powleczone są na płytce koniugatu testu zanurzeniowego. Mieszanina wędruje następnie przy pomocy sił kapilarnych wzdłuż membrany i zachodzi w interakcję z odczynnikami znajdującymi się na membranie. Jeżeli w próbce znajduje się odpowiednia ilość antygenów wirusa Grypy typu A lub B, to w obszarze linii testowej „A” ew. „B” na membranie, pojawi się kolorowa linia. Pojawienie się tej kolorowej linii wskazuje na wynik pozytywny, podczas gdy brak linii oznacza wynik negatywny. Pojawienie się kolorowej linii w obszarze linii kontrolnej „C” służy jako kontrola procesowa i wskazuje na to, że dostarczona została wystarczająca ilość próbki, a membrana jest wystarczająco nasączona.

Zawartość zestawu:

- 10 testów zanurzeniowych Influenza A/B plus
- 10 próbek ekstrakcyjnych
- Materiał dodatkowy, dostarczony zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG: 10 sterylnych wymazówek
- 1 bufor "Buffer" (7 ml), zawiera azcydek sodu (
- 1 uchwyt na odczynniki
- 1 instrukcja obsługi

Dodatkowe materiały potrzebne do wykonania badania (nie zawarte w zestawie):

- Stoper
- ew. roztwór soli kuchennej, strzykawki i próbki (dla popłuczyn z nosa)
- ew. rurka odsysająca ze zbiornikiem (tylko dla aspiratów z nosa)
- ew. pipeta 300 µL (do popłuczyn/aspiratów z nosa)

Przechowywanie:

Zestawy testowe Influenza A/B plus powinny być przechowywane w temperaturze 2-30°C i stosowane do daty użyteczności podanej na opakowaniu. Test zanurzeniowy musi zostać w zamkniętym opakowaniu foliowym aż do momentu jej użycia. Nie



zamrażać testów.