

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-kasetowe-redchek-4w1-antygenowe-covid-19-rsv-flu-grypa-ab-25-szt-do-uzytu-profesjonalnego-p-1773.html>



Testy kasetowe RedChek™ 4w1 antygenowe Covid-19, RSV, flu Grypa A/B 25 szt. do użytku profesjonalnego

Cena	399,60 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	do 7 dni
Producent	redchek

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki łączony immunologiczny chromatograficzny test kasetowy do jakościowego wykrywania antygenów COVID-19, grypy A/B, RSV w wymazie z nosogardzieli. Ma on na celu pomóc w szybkiej diagnostyce różnicowej zakażeń COVID-19, grypy typu A i B, oraz RSV.

Test ma służyć jako środek pomocniczy w diagnozowaniu bakteryjnych chorób zakaźnych i procesów zapalnych. Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Obserwacja stanu zapalnego za pomocą testu CRP pozwala na monitorowanie przebiegu leczenia i zapewnia, że proces chorobowy jest pod kontrolą.

Ze względu na dużą liczbę możliwych objawów test nie jest przeznaczony dla określonej grupy docelowej pacjentów. Można go stosować w celu rozróżnienia infekcji bakteryjnych od wirusowych lub jeśli ma być oceniana obecność lub nasilenie procesów zapalnych.

Zasada działania testu Redchek® COVID-19 +Flu A/B +RSV Antigen Combo

Test COVID-19

Test antygeny COVID-19 to jakościowy test immunologiczny z przepływem bocznym do wykrywania białka N SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli. W tym teście przeciwciała specyficzne dla białka N SARS-CoV-2 jest oddzielnie powlekane na obszarach linii testowej kasety testowej. Podczas badania próbka reaguje z przeciwciałami przeciwko białku N SARS-CoV-2, które są opłaszczane na cząsteczkach. Mieszanina migruje w górę membrany, aby zareagować z przeciwciałem przeciwko białku N SARS-CoV-2 na membranie i wygenerować jedną kolorową linię w obszarach testowych. Obecność tej kolorowej linii obszarów testowych wskazuje na wynik pozytywny. Jeśli test został wykonany prawidłowo, w obszarze kontrolnym zawsze pojawi się kolorowa linia.

Test grypy w odmianach Influenza A i Influenza B

Jakościowy test immunologiczny z przepływem bocznym do wykrywania nukleoprotein grypy typu A i grypy typu B w wymazie z nosogardzieli. W tym teście przeciwciała swoiste dla nukleoprotein grypy A (Influenza A) i grypy B (Influenza B) są oddzielnie powlekane na obszarach linii testowej kasety testowej. Podczas badania próbka reaguje z przeciwciałami przeciwko grypie A i/lub grypie B, które są opłaszczane na cząsteczkach. Mieszanina migruje w górę membrany, aby zareagować z przeciwciałem przeciwko flu A i/lub flu B na membranie i wygenerować jedną lub dwie kolorowe linie w obszarach testowych. Obecność tej kolorowej linii w jednym lub obu obszarach testowych wskazuje na wynik pozytywny. Jeśli test został wykonany prawidłowo, w obszarze kontrolnym zawsze pojawi się kolorowa linia.

Test RSV


Jakościowy test immunologiczny z przepływem bocznym do wykrywania antygenu białka fuzyjnego wirusa RSV w wymazie z jamy nosowo-gardłowej. W tym teście przeciwciała swoiste dla syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) jest oddzielnie powlekane na obszarach linii testowej kasety testowej. Podczas badania próbka reaguje z przeciwciałami przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu, które są opłaszczane na cząsteczkach. Mieszanina migruje w górę membrany, aby zareagować z przeciwciałem przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu na membranie i wygenerować jedną lub dwie kolorowe linie w obszarach testowych. Obecność tej kolorowej linii w jednym lub obu obszarach testowych wskazuje na wynik pozytywny. Jeśli test został wykonany prawidłowo, w obszarze kontrolnym zawsze pojawi się kolorowa linia.

Zawartość opakowania Redchek® COVID-19 + Grypa influenza A/B +RSV Antigen Combo 25szt.

- Kasety testowe
- Końcówki kroplomierza
- Odczynniki ekstrakcyjne
- Sterylne wymazy
- Rury ekstrakcyjne
- Ulotka informacyjna

Procedura wykonania testów COVID-19, RSV Grypa typu A i B



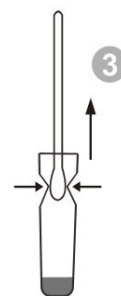

Elementy dodatkowe nie będące w zestawie, nie są konieczne do podstawowego badania

- [Minutnik laboratoryjny](#)