

Link do produktu: <https://redmed.pl/uasure2-roztwor-kontrolny-systemu-kwasu-moczowego-w-krwi-do-uzytku-profesjonalnego-szpitala-przychodnie-laboratorium-punkty-pobran-p-1755.html>



UASure2 – Roztwór kontrolny Systemu kwasu moczowego w krwi do użytku profesjonalnego, szpitale, przychodnie, laboratorium, punkty pobrań.

Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Celem testu z roztworem kontrolnym jest sprawdzenie działania glukometru UASure II do pomiaru kwasu moczowego we krwi przy użyciu roztworu testowego o znanym zakresie kwasu moczowego. Test z roztworem kontrolnym, który mieści się w dopuszczalnym zakresie, wskazuje, że technika użytkownika jest odpowiednia i zarówno glukometr, jak i pasek testowy działają razem prawidłowo.

Kiedy przeprowadzać testy kontroli jakości

- Przy pierwszym użyciu glukometru, przed wykonaniem badania kwasu moczowego we krwi.
- Po otwarciu nowego opakowania pasków do badania kwasu moczowego UASure II.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że glukometr lub paski testowe UASure II nie działają prawidłowo.
- Gdy paski testowe zostały wystawione na działanie ekstremalnych temperatur.
- Jeśli miernik został upuszczony.
- Aby zweryfikować dokładność monitora.
- Przecwiczenie procedury testowej.

Instrukcje dotyczące roztworu kontrolnego

- Dopuszczalny zakres dla roztworu kontrolnego jest podany na każdym opakowaniu pasków testowych.
- Drukowany zakres roztworów kontrolnych dotyczy wyłącznie roztworu kontrolnego kwasu moczowego marki UASure II.
- Zawsze sprawdzaj datę ważności. NIE WOLNO używać roztworu kontrolnego, jeśli wygasł.
- Nowo otwarte butelki z roztworem kontrolnym muszą być oznaczone datą otwarcia; wyrzucić niewykorzystany roztwór kontrolny po upływie terminu ważności lub trzy miesiące po otwarciu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Po użyciu roztwór kontrolny należy przechowywać w lodówce. NIE ZAMRAŻAĆ. Gdy roztwór kontrolny ma być ponownie użyty, przed użyciem należy odstawić go w temperaturze pokojowej na co najmniej 30 minut.
- NIE WOLNO dotykać paska testowego końcówką butelki z roztworem kontrolnym.
- NIE WOLNO nanosić drugiej kropli roztworu kontrolnego na pasek testowy.
- Założyć nasadkę na butelkę z roztworem kontrolnym natychmiast po użyciu.