

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-sinocare-safe-aq-ug-i-150-paskow-kwasu-moczowego-p-1620.html>

Zestaw Sinocare Safe AQ UG i 150 pasków kwasu moczowego

Cena	299,70 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	Safe AQ UG 150
Kod producenta	SNC005+3xSNC021

Opis produktu

Zestaw Sinocare Safe AQ UG 150 testów kwasu moczowego dla osób z cukrzycą i dną moczanową, podagrą, lub w ciąży. Wyniki z małych próbek włósniczkowej krwi pełnej lub żyłnej krwi pełnej.

Sinocare Safe AQ UG jest przeznaczony do testów kwasu moczowego i glukozy przy pomocy łatwego w użyciu, pojedynczego urządzenia. umożliwia sprawdzenie dwóch bio-markerów jednym urządzeniem. Na system składa się z elektroniczne urządzenie pomiarowe, oraz paski do testów glukozy i kwasu moczowego.

Zestaw zawiera

- Urządzenie pomiarowe Safe AQ UG meter
- 150 pasków Safe AQ UG do testów kwasu moczowego - 3 opakowania 50 szt. (6x25)
- Nakłuwacz automatyczny o regulowanej głębokości nakłucia

Monitor Safe AQ UG

Miernik z podwójną funkcjonalnością

Dokładne wyniki i praktyczna obsługa

Łatwe kodowanie

Zabezpieczenie przed niepożądanym wpływem na wynik

Automatyczny wyrzutnik pasków

Specyfikacja Safe-AQ UG:

- Test glukozy we krwi
 - Metoda badania: FAD-GDH
 - Rodzaj próbki: Obwodowa pełna krew kapilarna / pełna krew żylna
 - Próbkę krwi: 0,6 µl
 - Zakres testowy: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)
 - Czas testu: 5 s
- Test kwasu moczowego

-
- Metoda badania: kwas ferrocenokarboksylowy
 - Rodzaj próbki: krew obwodowa włośniczkowa pełna / żylna krew pełna
 - Próbkę krwi: 3 µl
 - Zakres testowy: 3 - 20 md/dL
 - Czas testu: 25 s
-
- Pamięć: 100 wyników testu
 - Bateria: 2 baterie AAA (Baterie nie są dołączone do opakowania)

Safe AQ UG analizator glukozy i kwasu moczowego w krwi

Wyniki kwasu moczowego i glukozy w domu w każdej chwili



Miejsce na
test kwasu
moczowego

Miejsce na
test glukozy



Jedno urządzenie
Dwa testy



Łatwe kodowanie



100 zapisów GLU
100 zapisów UA



Wymaga tylko
0,6 µl krwi

SAFE-AQ UG

System monitorowania glukozy i kwasu moczowego w krwi



SPECYFIKACJA

PARAMETR	TEST GLUKOZY	TEST KWASU MOCZOWEGO
Metoda testu	FAD-GDH	kwas ferrocenokarboksylowy
Rodzaj próbki	Obwodowa pełna krew kapilarna / pełna krew żylna	krew obwodowa włośniczkowa pełna / żylna krew pełna
Próbka krwi	0,6 µl	3 µl
Zakres testu	20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)	3 - 20 md/dL
Czas testu	5 sekund	25 sekund
Pamięć wyników	100 testów	100 testów
Ważność pasków	18 miesięcy	12 miesięcy

CECHY



ŁATWE KODOWANIE



ZABEZPIECZENIE PRZED
NIEPOŻĄDANYM WPŁYWEM
NA WYNIK



PODWÓJNA
FUNKCJONALNOŚĆ



DOKŁADNE WYNIKI



AUTOMATYCZNY
WYRZUTNIK PASKÓW

Duża pamięć wyników

Po 100 zapamiętanych wyników na każdy parametr, zapisywane na bieżąco.
Poznaj zmiany poziomu glukozy i kwasu moczowego w każdym czasie.



100 zapisów glukozy w krwi



100 zapisów kwasu moczowego w krwi

Opis analizatora Safe AQ UG



Wyrzutnik zużytych pasków

Usunięcie z urządzenia paska testowego
jednym przyciskiem.



Certyfikaty jakości



5 autorytatywnych certyfikatów: CE, RiliBak, GMP, CFDA, ISO9001.

Testy kwasu moczowego Safe AQ UG

Paski Testowe Sinocare Safe AQ UG do określenia stężenia kwasu moczowego w krwi mają wysoką dokładność wyników i są doskonale przystosowane do samokontroli pacjentów, lub użytku profesjonalnego jako pomoc w leczeniu hiperurykemii.

Do uzyskania wyniku wystarczy świeża mała próbka kapilarna lub żylna.

Fiolka zawiera 25 pasków testowych.



- Wielkość próbki: 3 μ L
- Zakres pomiaru systemu: 181 μ mol/L~1188 μ mol/L (3,0 mg/dL~20,0 mg/dL)
- Czas badania: 25 sekund
- Odczynnik w pasku składa się z oksydazy kwasu askorbinowego, pochodnej ferrocenu, roztworu buforowego, itp.

Przechowywać paski w zakresie temperatur 1°C~30°C. Nie zamrażaj.

Nie przechowywać pasków w pomieszczeniach o wysokiej temp. lub wilgotności takich jak kuchnia czy łazienka.

Przechowywać nieużywane paski w oryginalnej fiolce z zakręconą zakrętką.

Automatyczny nakłuwacz z regulowanej głębokości nakłucia



Automatyczny nakłuwacz do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej, jest przeznaczonym do wielokrotnego użycia przez jedną osobę.

Regulowana nasadka pozwalająca ustawić głębokość nakłucia zależnie od grubości skóry oraz specjalną nakładkę do pobierania krwi kapilarnej z miejsc alternatywnych takich jak przedramię, ramię, udo, łydka itd.

Wygodny kształt długopisu i mały rozmiar.

Łatwy w użyciu

Zredukowane odczucie dyskomfortu przy nakłuciu.

Jednorazowe lancety 28G Sinocare Soft Twist Lancets

Zestaw nie zawiera lancet

Opakowanie 50 sztuk

Sinocare Soft Twist 28G Lancets są przeznaczone do jednorazowego użycia przy pobieraniu krwi. Świetnie pasują do większości standardowych nakłuwaczy z regulowaną głębokością nakłucia.

Przy pomocy lancet Soft Twist uzyskuje się próbkę krwi doskonale nadającą się do badania poziomu glukozy i kwasu moczowego w krwi.