

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-uasure-6-analizator-uasure-i-6-op-testow-do-kontroli-kwasu-moczowego-do-leczenia-dny-moczanowej-podagry-p-450.html>



Zestaw UASure +6, analizator UASure i 6 op. testów do kontroli kwasu moczowego do leczenia dny moczanowej, podagry

Cena	300,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	uasure zestaw 6
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Nowy dostępny

Safe AQ UG

Monitor kwasu moczowego
z pomiarem glukozy

Tańsze paski testowe




Regularne badanie i długoterminowe śledzenie poziomu kwasu moczowego we krwi jest bardzo ważne w wykrywaniu bezobjawowej hiperurikemii. Jest to schorzenie, które może przyczynić się do niektórych chorób nerek, a także prowadzić do rozwoju pierwotnej i wtórnej skazy moczanowej, jeśli jest ignorowane.

Monitor kwasu moczowego, wykorzystujący nowoczesną technologię, jest przenośnym i łatwym w użyciu systemem monitorowania, który pojawił się na rynku i przeznaczony jest zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy medycyny. Wynik otrzymujemy z jednej kropli krwi pobranej z palca pacjenta. Do badania wykorzystuje się paski testowe jednorazowego użytku.

Dane techniczne analizatora UASure

- Zakres pomiarowy 3 - 20 mg/dL (179 - 1190 μ mol/L)
- Czas pomiaru to 20 s.
- Zakres pracy to 20 - 25 °C.
- Paski testowe do kontroli kwasu moczowego mogą być przechowywane w temperaturze 4 do 30 °C.
- Objętość kropli krwi to zaledwie 3 μ l.
- Badanie przeprowadza się z krwi pobranej z palca.

- Zakres hematokrytu to 30-55%.
- Urządzenie działa na baterie typu CR2032 (dostępne w każdym sklepie).
- Baterie wystarczają na ponad 1000 badań.
- Analizator posiada duży czytelny wyświetlacz LCD o dużym kontraście.

Paski testowe UASure cechują się wyjątkowo wysoką jakością uzyskiwanych wyników za sprawą indywidualnie pakowanych pasków. Testy pakowane są indywidualnie w opakowania foliowe szczelnie chroniące przed wilgocią. Pasek do badania kwasu moczowego indywidualnie otwierasz dopiero przed samym pomiarem. Takie rozwiązanie w porównaniu do innych systemów, w których paski pakowane są w słoiczki zbiorcze jest dużo lepszym rozwiązaniem.

Paski do UASure są pakowane w jednorazowe ochronne folie, które zabezpieczają paski przed wilgocią oraz zanieczyszczeniami. Hermetyczne pakowanie pasków do kwasu moczowego w znaczący sposób wpływa na jakość i dokładność uzyskiwanych wyników kwasu moczowego na aparatach UASure.



■ Proste wkładanie



■ Próbką z palca




■ Aplikacja próbki

Dokładność UASure

Dokładność opisuje, jak dobrze odczyty z systemu testowego (urządzenie i paski testowe) zgadzają się z odczytami z akceptowanego systemu odniesienia (analyzer laboratoryjny). Niezależne laboratoria w Hamburgu i Postfach w Szwajcarii uznały, że miernik UASure jest bardzo dokładny, a wyniki z obu laboratoriów dobrze odpowiadały z wynikami z testera EPAC 6140. Badania porównawcze krwi kapilarnej i żyłnej między systemem UASure a systemem Hitachi / Roche dają następujące dane regresji liniowej:


Wyniki dla krwi kapilarnej

Badania kliniczne dla krwi kapilarnej	
Numer próbek :	450
Zasięg:	2,6 mg/dL do 14,5 mg/dL
Nachylenie:	0,949
Punkt Przecięcia:	0,246 mg/dL
Współczynnik korelacji:	0,969

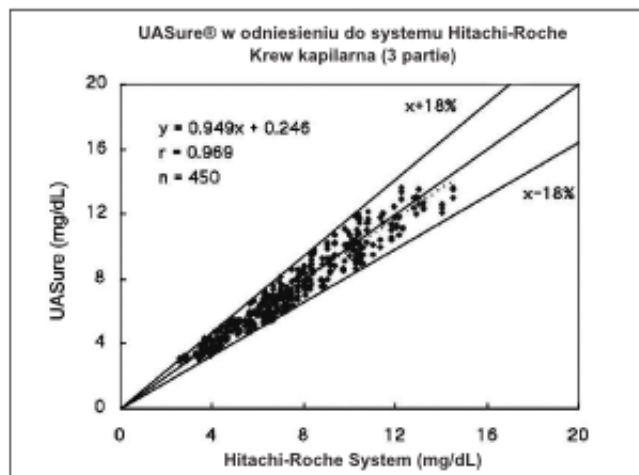

Wyniki dla krwi żyłnej

Badania kliniczne dla krwi żyłnej	
Numer próbek :	480
Zasięg:	2,6 mg/dL do 20,2 mg/dL
Nachylenie:	0,953
Punkt Przecięcia:	0,125 mg/dL
Współczynnik korelacji:	0,984

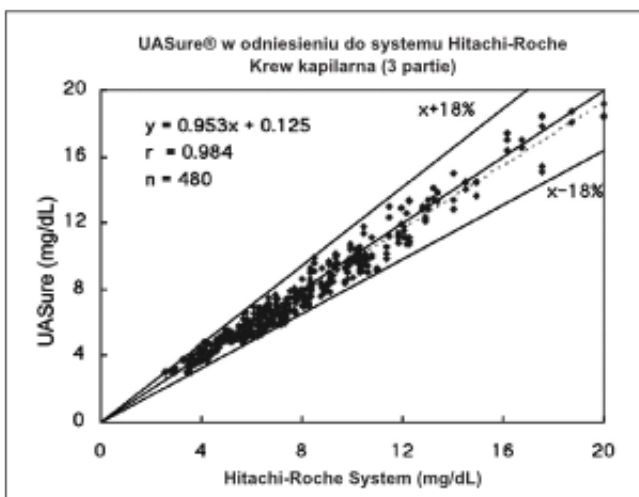

Precyzja UASure

Precyzja opisuje, jak spójne odczyty pochodzą z tego samego systemu testowego. Do badań precyzji w trakcie i między seriami wykorzystano trzy serie pasków testowych UASure. Krew żylna w probówkach z heparyną została wzbogacona do 4 stężeń. Odczyty kwasu moczowego we krwi rejestrowano przez 10 dni, uzyskując 100 punktów danych dla każdego stężenia. Dane uśredniono za pomocą trzech partii pasków testowych, jak pokazano w poniższej tabeli:

Ilość badań	100	100	100	100
Średni wynik (mg/dL)	5,7	9,0	11,9	15,0
SD (mg/dL)	0,26	0,37	0,45	0,44
CV (%)	4,5	4,2	3,8	2,9

Zestaw Zawiera

- Analizator UASure,
- 6 opakowań testów UASure do badania kwasu moczowego,
- 5 jednorazowych lancet do nakłuwacza,
- nakłuwacz automatyczny na wymienne lancety,
- test kontrolny,
- czarne etui,
- Instrukcja PL, EN ...
- 2-letnią rękojmią



Do produktu dodajemy Poradnik dla badającego poziom kwasu moczowego GRATIS!